

ARMON AYURA



ARMON AYURA HANDLEIDING





1. INHOUDSOPGAVE
2. OVERZICHT ARMON AYURA
3. OVERZICHT BRACE
4. OVERZICHT VOET
5. PLAATSEN ARMON AYURA
6. PLAATSEN BRACE
7. ARM IN BRACE PLAATSEN
8. BEDIENING
9. LOSHALEN ARMON AYURA
10. OPBERGEN ARMON AYURA
11. GEBRUIK EN ONDERHOUD
12. CONTACT





OVERZICHT ARMON AYURA

Onderdelen van de Armon Ayura

- 1. Brace
- 2. Bovenarm
- 3. Onderarm
- 4. Basis
- 5. Onderstel
- 6. Ophangpunt




Onderdelen van de brace

1. Elleboogsteun
2. Schaal
3. Strap met extra schaaldeel (niet op alle uitvoeringen aanwezig)
4. Elleboog draaipunt (niet op alle uitvoeringen aanwezig)
5. Hulpveertje (niet op alle uitvoeringen aanwezig)
6. Haak met clip
7. Polssteun (niet op alle uitvoeringen aanwezig)




Onderdelen van de voet

1. Vleugelschroef
2. Ogen
3. Buis
4. Vleugelmoer

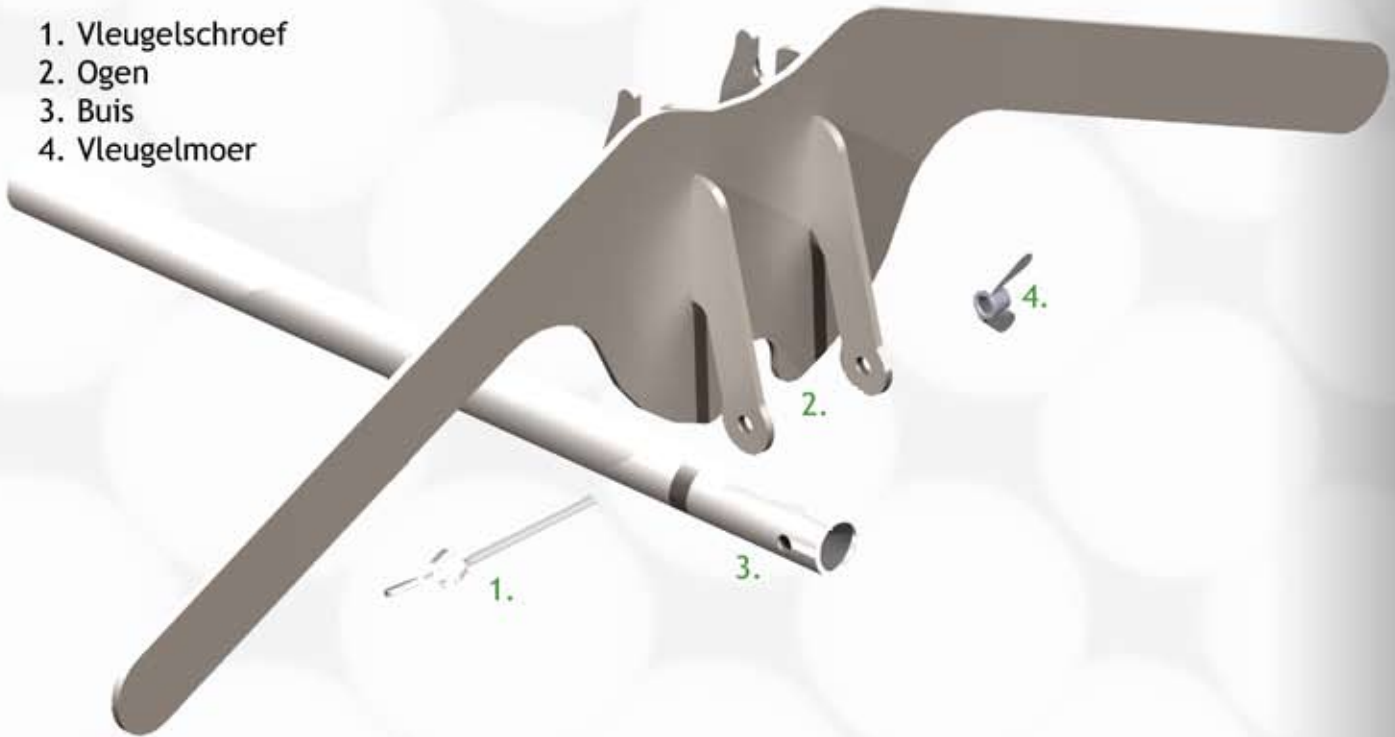

Voet in elkaar zetten.

Steek de vleugelschroef door de ogen en door de buis terwijl de buis tussen de ogen zit. Plaats de vleugelmoer op de vleugelschroef en draai deze handvast aan, er blijft ruimte tussen de ogen en de buis:

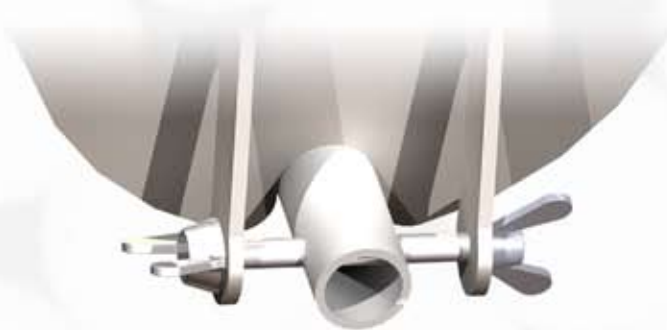


Ingeklapte poot;
compacter op te bergen.



Uitgeklapte poot;
als voet om de Ayura op te plaatsen.



PLAATSEN

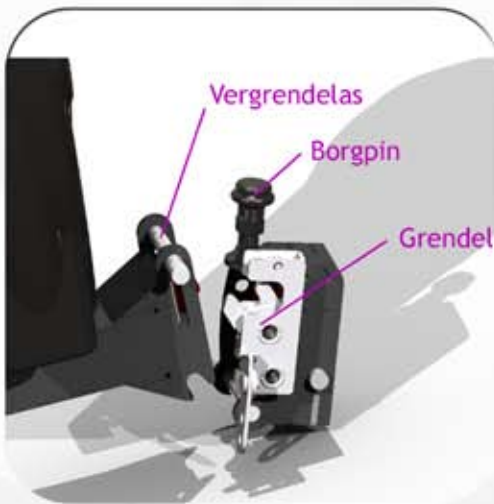


Plaatsen van de Armon Ayura in het ophangpunt aan de rolstoel.



Zorg er voor dat de grendel open staat. Haak het draaibare onderstel van de Armon Ayura op de horizontale as in het ophangpunt. Let erop dat beide haken binnen het ophangpunt vallen.



Trek de borgpin omhoog zodat de vergrendelas er onderdoor kan bewegen.

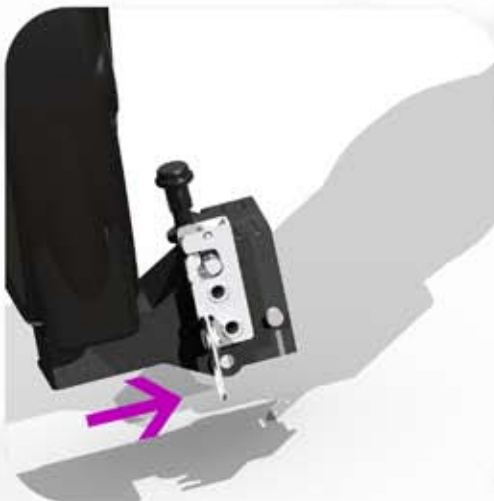

Druk nu de Armon Ayura in de vergrendeling. De vergrendelas klikt in de grendel en achter de borgpin.





Het plaatsen van de brace aan de Armon Ayura.

1: Buig de veerclip naar binnen zodat de haak vrijkomt.



2: Plaats de haak tussen de twee ringen aan het uiteinde van de bovenarm van de Armon Ayura.



3: Laat de veerclip los, en zorg ervoor dat de kop van de schroef door de opening in de veerclip steekt.






Arm in de brace plaatsen.

Maak de strap los (indien aanwezig).



Leg de onderarm in de brace, waarbij de elleboog vrij dient te zijn. De elleboogsteun hoort vlak boven de elleboog de bovenarm te raken. (De elleboogsteun is buigbaar om een comfortabele passing te krijgen.) Maak nu de strap weer vast om de onderarm, met het extra schaaldeel bovenop.

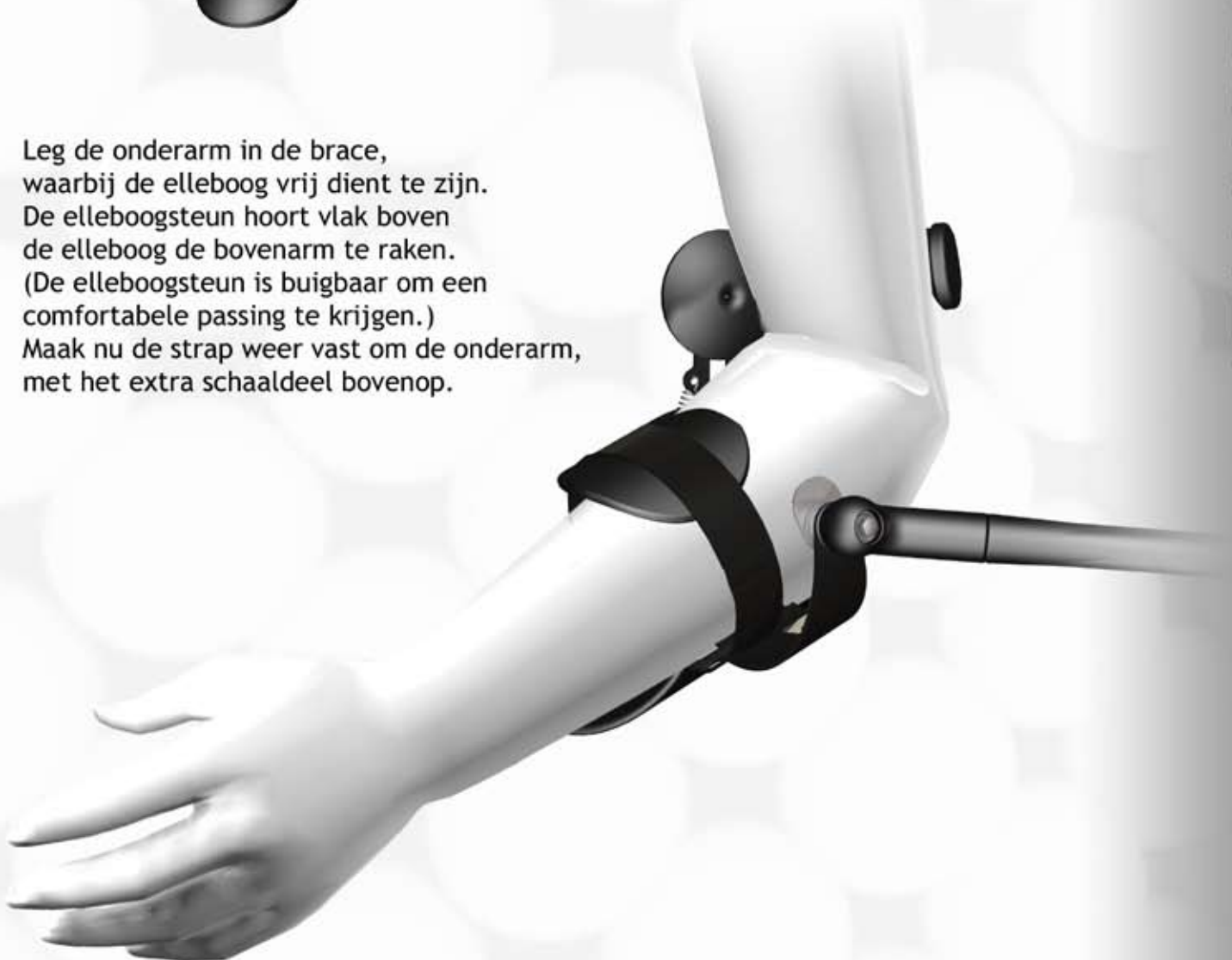



De bediening van de Armon Ayura gebeurt via het knoppenkastje of via geïntegreerde besturing op de rolstoel.

Het knoppenkastje kan alle functies van de Armon Ayura activeren volgens onderstaand schema:



Met de 'blauwe' (POWER) toetsen regel je traploos de hoeveelheid compensatiekracht waarmee de arm wordt opgetild.*

Met de 'roze/paarse' (TILT) toetsen regel je de verticale stand van de complete Armon Ayura, met het effect dat je hiermee beter of verder kunt reiken en/of naar achteren bewegen.

Met de 'rode/oranje' (BRAKES) toetsen kun je een bewegingsvrijheid blokkeren en weer vrijgeven**.

De rotatielock (rood) blokkeert de rotatie in het bevestigingspunt.

De verticale lock blokkeert de gecombineerde verticale/horizontale bewegings vrijheid.

Om de verticale lock te releasen dient de button minimaal 2 sec te worden ingedrukt.

Indien de verticale lock is geactiveerd kan de gewichtsinstelling niet direct worden gebruikt maar moet een van de 'POWER' buttons minimaal 2 sec worden ingedrukt.

De beide locks worden dan vrijgegeven voordat de kracht verstelt wordt.



* Met de 'blauwe' (POWER) buttons wordt de compensatiekracht verstelt. Aan het einde van het verstelbereik gaat de zoemende toon van de motor over in een bromtoon, dit geeft aan dat de verstelling niet verder kan, enkel weer de andere kant op...

** De locks zijn uitgevoerd als een vertanding die in elkaar moet grijpen, het kan voorkomen dat deze niet direct ingrijpt, dan is een lichte beweging van de arm in de Armon Ayura genoeg om de vertanding alsnog te laten grijpen. De lock geeft ongeveer 3 seconden de tijd om dit te laten gebeuren.

Let op: in een zeer korte tijd veelvuldig de locks activeren en releasen -met name de verticale/horizontale lock- kan tot oververhitting van componenten leiden, dit dient ten alle tijden vermeden te worden!





LOSHALEN

Loshalen van de Armon Ayura uit het ophangpunt aan de rolstoel.



Trek de zwarte borgping omhoog



De Armon Ayura valt iets naar buiten in de grendel.



Trek aan de hendel van de grendel. PAS OP, de Armon Ayura is nu los en kan uit het ophangpunt vallen, gebruik twee handen!




De Armon Ayura kan nu uit het ophangpunt genomen worden.



Opbergen

Bij de Armon Ayura wordt een voet geleverd (zie ook blz 4) waar de Armon Ayura rechtstandig in kan worden geplaatst als deze tijdelijk niet op de rolstoel is gewenst. Plaatsen gaat net als in het ophangpunt op de rolstoel (zie blz 5), alleen is hier geen vergrendeling van de Armon Ayura.

Het draaibare onderstel valt over de as in de voet, en de vergrendelas van het onderstel valt in de uitsparing bovenaan. De brace kan aan de Armon Ayura bevestigd blijven.

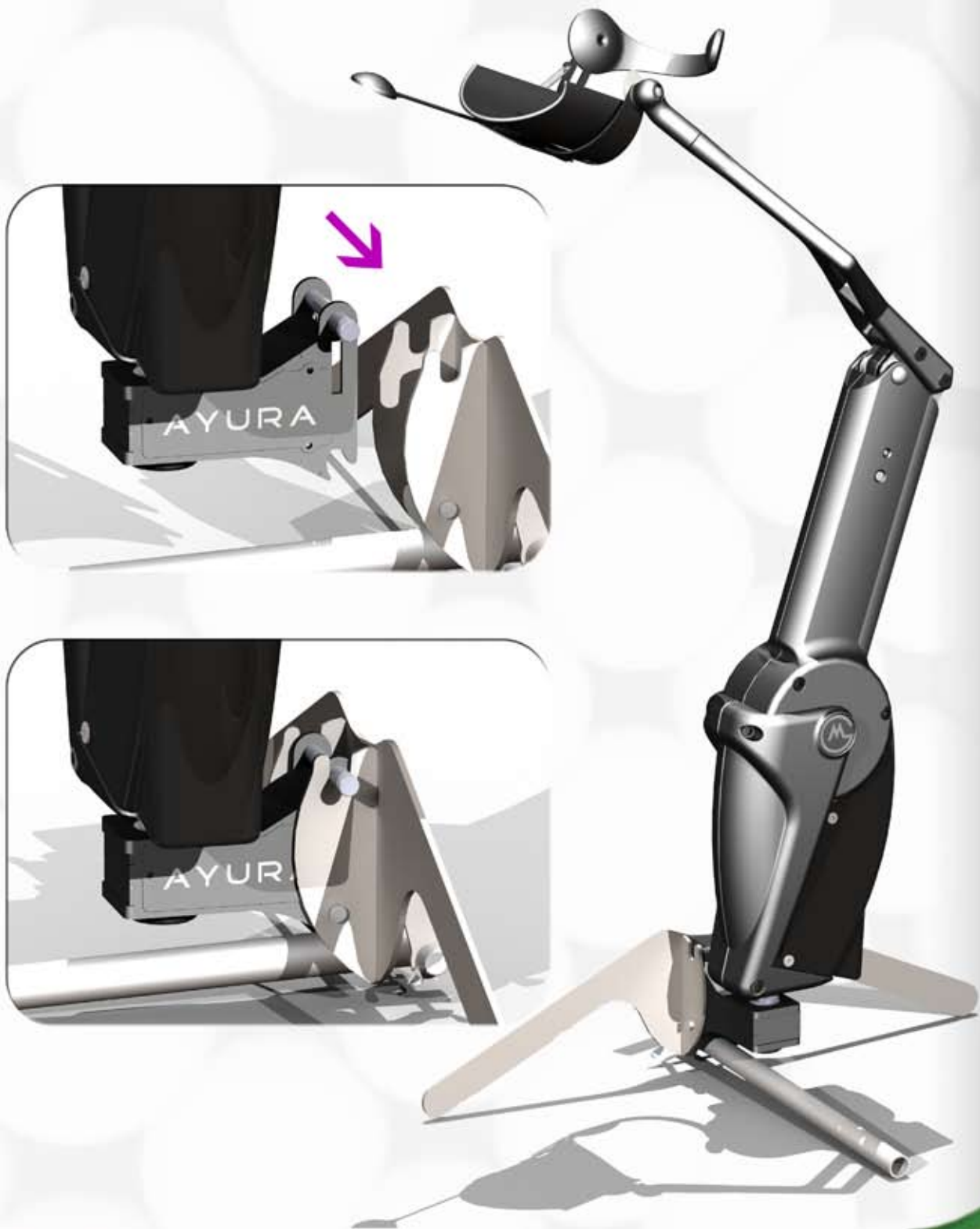



Gebruik

Tijdens transport los van de rolstoel mag de Armon Ayura NIET gelocked zijn. Dit geldt voor zowel de verticale als de rotatie lock.

LET OP: wanneer de arm van de gebruiker niet meer in de brace ligt als de verticale lock vrijgegeven wordt kan de bovenarm van de Armon Ayura plots omhoog schieten. Dit dient ten alle tijde voorkomen te worden om schade aan het product of aan personen te voorkomen.

Reinigen

De Armon Ayura, de brace en de bediening kunnen gereinigd worden met een vochtige doek. De Armon Ayura is spatwaterbestendig, de bediening en de brace zijn waterbestendig. Gebruik bij het reinigen geen bijtende middelen of detergenten.



Bij de productie van uw Armon Ayura is de grootste aandacht besteed aan de werking, afwerking en kwaliteit van uw product. Mocht u desondanks klachten of problemen ondervinden met uw product, of vragen hebben over het gebruik en de werking ervan, neemt u dan contact op met uw dealer.

Uw heeft uw Armon Ayura verkregen via:

RTD Het Dorp

Heijenoordseweg 130
6813 GC Arnhem
T 026 352 92 92
F 026 352 92 00
E info@rtdhetdorp.nl



...maakt méér mogelijk



De Armon Ayura is een product van Microgravity Products BV.

Wilt u op de hoogte gehouden van onze nieuwste ontwikkelingen?
Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief op www.armonproducts.com

