



**Lightwriter      SL40**

**Gebruikershandleiding**

**rt<sup>1</sup>d**  
*...maakt méér mogelijk*

## **Inhoud**

Welkom bij uw Lightwriter SL40	3
First Run Wizard	5
Wat de toetsen doen	7
Activiteiten	9
Gesprek	11
SMS tekstberichten	17
Contacten	21
Notitieboekje	23
Afstandsbediening	26
Alarmen	29
Instellingen en Snelkoppelingen	33
Een SIM-kaart installeren	48
Toetsenbord	50
Toetsenbordbescherming verwisselen	54
Hoe uw toetsenbord te reinigen	55
Bevestigingsplaat monteren	57
Probleemoplossen	58
Contactgegevens RTD Het Dorp B.V.	59

## Welkom bij uw Lightwriter SL40

De Lightwriter SL40 is een tekst-naar-spraak hulpmiddel voor communicatie met een verschil. Het doet meer dan alleen maar spreken wanneer u typt.

U kunt ook:

- SMS-berichten versturen met de ingebouwde mobiele telefoon
- Lange stukken tekst schrijven en bewaren en deze op een aantal verschillende manieren uit laten spreken
- Een telefoonboek bijhouden van de mensen aan wie u een sms-bericht stuurt
- Infra-rood gebruiken om toepassingen in uw huis te bedienen, bijvoorbeeld tv's, video's, dvd-spelers, televisie-ontvangstapparatuur, sommige soorten speelgoed
- Alarmen instellen om u te wekken, of om u te herinneren aan afspraken.



Voor toekomstig gebruik   Voor toekomstig gebruik   IR Ontvanger   Batterijstatus

## Uw Lightwriter SL40



Gebruikersscherm

Toetsenbord



Smooth talker

Vloeiende spreker

Oplaadaansluiting

IR Zender

Opladlampje (brand tijdens opladen)



Weergavescherm

Luidspreker



Voor toekomstig gebruik

## **First Run Wizard**

Wanneer u de Lightwriter de eerste keer aanzet, kan het u de **First Run Wizard** tonen. Deze zal u een paar vragen stellen om u te helpen met de instellingen van uw Lightwriter.

Gebruik in ieder scherm de **Verder** en **Terug** toetsen om een optie te kiezen, druk dan op **Uitvoeren** om te bevestigen. Druk op **Aan/C** als u terug wilt gaan en een eerdere instelling wilt wijzigen.

U kunt op **Shift** drukken en dan op **Uitvoeren** om een prompt te horen of een voorbeeld van de huidige instelling, of druk op **Shift** en dan op **Help** voor meer hulp.

### **Stem**

Stelt de standaard spreekstem in.

### **Spraakvolume**

Stelt het volume in van de standaard spreekstem.



### **Zoemgeluid**

Uw Lightwriter heeft een speciale toets om hulp te vragen, of iemands aandacht te vragen. U kunt hier het geluid kiezen dat deze toets moet maken.

### **Toetsklikvolume**

Stelt het volume in van het klikgeluid van het toetsenbord of schakelt dit uit.

### **Huidige tijd**

Stelt de huidige tijd in. Stel eerst de uren in, dan de minuten.

### **Huidige datum**

Stelt de huidige datum in. Stel eerst de dag in, dan de maand en dan het jaar.

Wanneer deze allemaal bevestigd zijn is de instelling klaar en uw Lightwriter is klaar voor gebruik.

U zult dan de **Activiteitenbalk** op het scherm zien, waarover u meer kunt leren in het **Activiteiten** onderdeel.

Lees echter eerst het volgende hoofdstuk over wat de verschillende toetsen doen.

## Wat doen de toetsen



On/C

Aan/C

**Aan** en **Wissen** toets

Deze toets heeft veel functies. Het zal uw Lightwriter wekken wanneer de hij in stand-by staat, een regel tekst wissen, of u terug laten keren naar het vorige scherm.

Indien **Shift-Aan/C** wordt ingedrukt terwijl u tekst invoert, dan zal het de laatste actie ongedaan maken. Dit is handig wanneer u per ongeluk tekst hebt gewist, of een aanbevolen Auto-correctie niet wilt gebruiken.

Aan/C 15 seconden ingedrukt houden zal uw Lightwriter opnieuw starten.

Let op, als u een demonstratie Lightwriter gebruikt, zal het herstarten door ingedrukt houden van de Aan/C toets uw apparaat terugzetten op de fabrieksinstellingen, en alle items verwijderen die u heeft toegevoegd.



**Activiteiten** toets

Deze toets kiezen zal u *altijd* naar de **Activiteitenbalk** brengen.




Next

Verder

**Verder** toets

Druk deze toets in om door de keuzes op de **Activiteitenbalk** te bladeren, of op een menu, of op vervolgmeneu's en pop-up tabs.

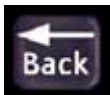

Back

Terug

**Terug** toets

Druk deze toets in om terug gaan door de keuzes op de **Activiteitenbalk**, of op een menu, of een vervolgmeneu of pop-up tabs. Indien gebruikt wanneer u tekst of nummers typt zal dit het laatste karakter wissen dat u getypt hebt.

Druk op **Shift-Verder** of **Shift-Terug** wanneer u tekst of nummers typt om de cursor naar links of rechts te bewegen zonder iets te wissen. Dit is handig met het redigeren of corrigeren van fouten. Rechts op het scherm wordt een terug of verder symbool getoond om u te vertellen dat deze functie actief is. Druk nogmaals op **Shift** om de functie te annuleren.



**Shift** toets

Druk deze één keer in gevolgd door een lettertoets om een hoofdletter te typen of een van de rode symbolen op de nummertoetsen druk bijvoorbeeld op **Shift-1** voor een uitroepteken.

Rechts op het scherm verschijnt een omhoog-pijltje symbool om u te vertellen dat shift is ingeschakeld.

Zie **Caps Lock** in **Instellingen** om het typen van langere tekst in hoofdletters makkelijker te maken.




Do

Uitvoeren (abbr. Uitv.)

**Uitvoeren** toets

Dit is de actietoets. Het zal uw Lightwriter het gemarkeerde item laten selecteren of spreken.

Indrukken van **Shift-Uitvoeren** zal de gemarkeerde items spreken, zoals aanbevolen woorden in tabs. Dit is handig wanneer het aanbevolen woord te lang is om te zien in de tab. U kunt dit altijd gebruiken wanneer u de prompt hoort.

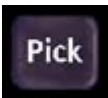

Pick

Kiezen

**Kiezen** toets

Druk deze toets in als u tekst typt en het zal de zinnenlijst doorzoeken naar zinnen die de letters of woorden bevatten die u heeft getypt.

**Shift-Kiezen** wordt gebruikt om het symboolmenu te zien waarmee u leestekens en symbolen in kunt voeren die niet getoond worden op het toetsenbord.

In **Instellingen** selecteert deze toets de standaard (fabrieks-) instellingen.



**Zoem** toets

Deze toets op ieder willekeurig moment indrukken geeft een onmiddellijk geluid om aandacht te trekken. **Shift-Zoem** geeft een alternatief geluid.

U kunt kiezen welke geluiden te horen zijn in het

**Instellingen**menu.




Menu

Menu

**Menu**-toets

Druk op **Menu** om een lijst te zien van de beschikbare handelingen voor de huidige activiteit. Indien er geen acties beschikbaar zijn voor een bepaald item, **dan zal Menu** niets doen.

**Shift-Menu** geeft een snelkoppeling om het volume van de spraak en de helderheid van de schermen in te stellen.

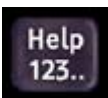

Help 123...

Help 123...

**Nummer** en **Help** toets

Deze toets heeft twee functies:

1. Het schakelt de nummer-modus in en uit bij het typen van tekst. Wanneer nummermodus aan staat kunt u nummers typen. Wanneer nummermodus uit staat zullen de nummertoeetsen bepaalde tabs kiezen of andere items. Een **123...** symbool wordt rechts op het scherm weergegeven

- om u te helpen herinneren dat te nummermodus aan staat.
2. Indrukken van **Shift-123** toont u **Help** voor de activiteit die u gebruikt.

## Activiteiten



Gesprek   SMS + Signaalindicator   Contacten   Notities   Afstandsbediening   Alarm   Instellingen   Snelkoppelingen

Iedere activiteit heeft een symbool als hier getoond op de **Activiteitenbalk**.

De meeste schermen tonen rechts bovenaan een klein symbool voor de huidige activiteit.

Gebruik om een activiteit te kiezen de **Verderen Terug** toetsen om de activiteit te markeren die u wenst en druk dan op **Uitvoeren** om te selecteren. De naam van de gemarkeerde activiteit wordt links onderaan op het scherm getoond.

Of u kunt snelkoppelen naar iedere activiteit door het nummer in te drukken dat op de tab wordt getoond, of door een letter in te drukken om direct naar **Gesprekte** gaan.

### Snelle tip


#### Ingebouwde hulp

Wanneer u de

Lightwriter gebruikt, heeft u altijd toegang tot het help-menu. Gewoon

**Shift-123... indrukken** Dit vertelt u over het momenteel geselecteerde item.

## Wat u op het scherm ziet

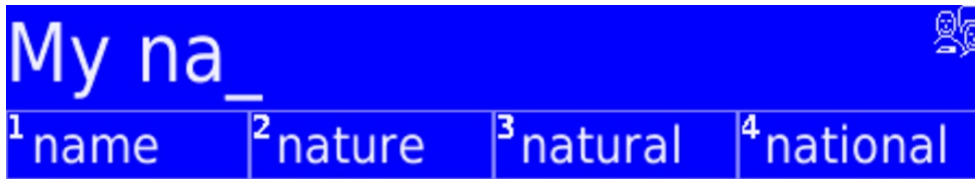

My na\_  
name nature natural national

Mijn na\_  
naam natuur natuurlijk nationaal

Dit toont het standaard **Gespreks**-scherm. U kunt voorspellingen zien in de genummerde tabs onderaan het scherm. Rechts bovenaan toont een symbool de activiteit die u gebruikt. Hier kunt u ook de andere symbolen zien die verschillende dingen aanduiden:

Shift	Caps Lock	Batterij bijna leeg	Navigatie lock
Nummermodus	Nieuw SMS-bericht	Tweede conversatiemodus	Stille modus



Shift



Caps Lock



Batterij bijna leeg



Navigatie Lock



Nummermodus



Nieuw SMS-bericht




2nd

Tweede conversatiemodus

2e



Stille modus

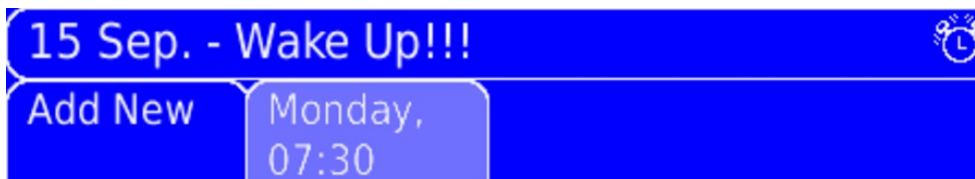

15 SEP. - Wake Up!!!  
Add New Monday 07:30


15 sep. - Wakker Worden!!!  
Nieuwe toevoegen maandag 07:30

Dit toont de **Alarm**activiteit. De onderste helft van het scherm toont een lijst met items in de tabs. Als u een van de items markeert, toont de bovenkant van het scherm een voorbeeld van wat het item bevat.



## Gesprek

De belangrijkste functie van uw Lightwriter is het spreken van de woorden die u typt. Hiervoor dient u de **Gespreks-**activiteit te gebruiken, die er als volgt uit ziet:

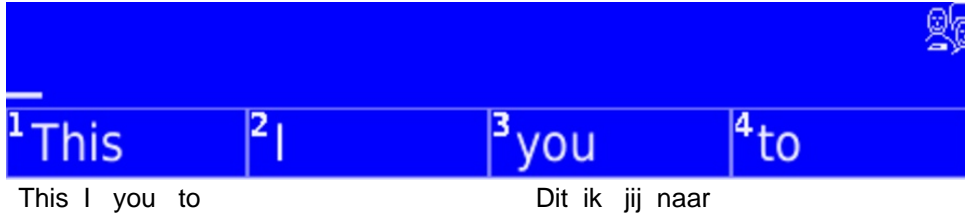

Alles wat u typt verschijnt in de bovenste helft van het scherm, en ook op het weergavescherm aan de voorkant om te worden gelezen door uw gesprekspartners. Om in te stellen hoeveel tekst zichtbaar is op het weergavescherm, zie **Zichtbare Regels in Instellingen**.

Hoe deze tekst wordt gesproken is afhankelijk van uw spraakinstellingen voor de Lightwriter. Zie **Spraakmodus in Instellingen**.

## Communicatieverbetering

Uw Lightwriter heeft een aantal verschillende manieren om u te helpen om uw communicatie te versnellen. Deze worden hieronder uiteengezet.

### Voorspellingen

Uw Lightwriter onthoudt automatisch de woorden die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt. Wanneer u begint te typen zal de Lightwriter proberen te voorspellen wat u waarschijnlijk als volgende zult zeggen, en deze voorspellingen verschijnen in de vierkante tabs onderaan het scherm. Wij hebben sommige woorden en zinnen ingebouwd om u op weg te helpen. Uw Lightwriter leert terwijl u typt, dus de accuratesse van deze voorspellingen zal toenemen hoe meer u het apparaat gebruikt.

Om een voorspelling te gebruiken, drukt u ofwel op de nummertoes links bovenaan of op de voorspellingentab (zorg ervoor dat de Nummermodus uit staat) of blader door de voorspellingen met de **Verder** en **Terug** toetsen en druk op **Uitvoeren** om te selecteren.



15 SEP. - Wake Up!!!

Add New Monday 07:30

15 sep. - Wakker Worden!!!

Nieuwe toevoegen maandag 07:30

Let op, als u besluit dat u geen voorspellingen wilt gebruiken bij de **Gespreks-**activiteit, schakel dan **Woordvoorspelling** in **Instellingen** op uit. U scherm zal er dan als volgt uitzien:

# Hello, i am feeling good, how are you today?\_



Hello, I am feeling good, how are you today?\_

Hallo, ik voel me goed, hoe gaat het met jou vandaag?\_


## Nieuwe woorden

Ook al heeft de Lightwriter een zeer groot woordenboek, toch zijn ongewone woorden of namen niet altijd opgenomen. Om uw Lightwriter snel een nieuw woord te leren, typt u het gewoon drie keer in, bv. Sjors Sjors Sjors Wanneer u gevraagd wordt of u het toe wilt voegen aan het woordenboek, selecteer **Toevoegen**. Het woord wordt dan aangeboden als een voorspelling waar van toepassing, of wanneer u de volgende keer begint om het te typen.

## Zinnen

Om een hele zin op te slaan op uw Lightwriter SL40, typ het gewoon in, druk op **Menu**, en selecteer **Opslaan Zin**. Zo gemakkelijk is dat.

Om een volledige lijst met zinnen te zien, druk op de **Kiezen** toets in een leeg scherm. Om een kortere zinnenlijst te zien, type een sleutelwoord in of een paar letters van de zin voordat u op **Kiezen** drukt. Alleen zinnen die de tekst bevatten die u heeft getypt worden dan weergegeven. Bijvoorbeeld, het indrukken van **Kiezen** na het typen van 'glas' of 'gla' wordt weergegeven als 'Mag ik alstublieft een glas ...'. Om een bepaalde zin te kiezen, blader door de lijst met **Verderen** **Terug** en het indrukken van **Uitvoeren** om te selecteren, of gebruik de van toepassing zijnde nummertoes. Om terug te keren naar typen zonder een selectie te maken druk opnieuw op **Kiezen**.

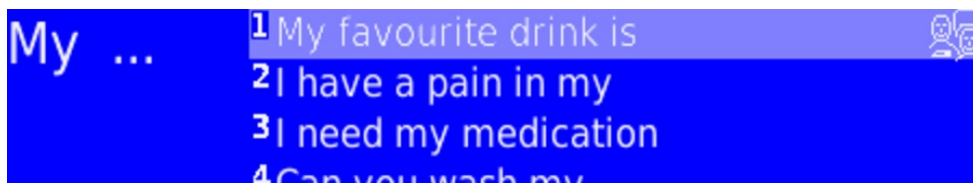

My...  
My favourite drink is  
I have a pain in my  
I need my medication  
Can you wash my

Mijn  
Mijn favoriete drankje is  
Ik heb pijn in mijn  
Ik heb mijn medicijnen nodig  
Kunt u op mijn ... wassen

## Uitgebreide afkortingen

Uitgebreide afkortingen zijn een manier voor u om de hoeveelheid typen te reduceren om een frequent gebruikt bericht zin of naam te produceren. Bijvoorbeeld, **tc** kan gebruikt worden als representatie van **Toby Churchill**.

Om een uitbreiding van een afkorting op te slaan, typ de hele zin of een woord (bv. Toby Churchill), druk dan op **Menu** en selecteer **Maak een**

Snelle tip

Uw Lightwriter heeft een aantal veel gebruikte incomplete zinnen voor u opgeslagen om aan te passen bv. **Ik wil naar de/het ... gaan**  
Roep de zin op, maak hem af en gebruik de zin of sla hem op.

**Afkorting.** Typ uw gekozen afkorting (bv.**tc**), en druk op **Uitvoeren** om op te slaan. U kunt vele verschillende woorden en zinnen opslaan met dezelfde afkorting, maar wij raden aan dat u niet het begin van een woord gebruikt als afkorting (bv. het is beter om **hp** dan **ha** te gebruiken voor Harry Potter). Uw zin of woord zal nu worden weergegeven in de voorspelling tabs wanneer u de afkorting typt en deze krijgt voorrang boven een voorspelling.

### Spraakuitzonderingen


Som kan het voorkomen dat uw Lightwriter een woord niet goed uitspreekt. U kunt de manier waarop woorden worden uitgesproken veranderen door Spraakuitzondering te gebruiken. Zie **Woord Geheugen** in de **Instellingen** activiteit over hoe een Spraakuitzondering te maken. U dient dan wel in staat zijn om het woord te typen zoals u wilt dat het klinkt. Probeer om dit te doen het woord fonetisch in te voeren, of door streepjes of spaties toe te voegen om het woord op te breken in delen. Typ bijvoorbeeld Wijchen in als Wie-chen om het goed te laten klinken.

### Snelle tip

Woordenboek woorden, Zinnen, Afkortingen, Spraakuitzonderingen en Auto-correcties kunnen ook worden toegevoegd, bewerkt of gewist in het **Woordgeheugen** gedeelte van de **Instellingen** activiteit.

### Auto-correctie

Uw Lightwriter zal automatisch sommige veel voorkomende spelfouten voor u corrigeren, bijvoorbeeld **hte** wordt gecorrigeerd naar **het**. U kunt uw eigen auto-correcties toevoegen als u vindt dat u altijd een woord fout typt. Gebruik ofwel **Woordgeheugen** in **Instellingen**, of wacht op een prompt om het woord aan het woordenboek toe te voegen, en selecteer **Niet Toevoegen**. U wordt dan gevraagd of u dit woord wilt laten auto-corrigeren. Selecteer **Ja** en typ het correcte woord in (druk op **Help** als u hier problemen mee heeft). In de toekomst wordt het fout gespelde woord dan automatisch gecorrigeerd. Om een auto-correctie te verwijderen, zie **Woordgeheugen** in de **Instellingen** activiteit.

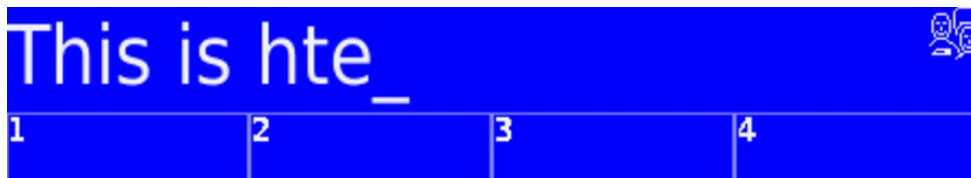


This is the

Dit is het

### Nummers typen

Om nummers in te voeren in het tekstschermb, schakel **Nummermodus** in door de **123...** toets in te drukken. Een **123...** symbool wordt rechts op het scherm weergegeven wanneer u zich in **Nummermodus** bevindt. **Nummermodus** wordt automatisch ingeschakeld in tekstschermben die geen voorspellingen hebben, bijvoorbeeld wanneer u een naam of een telefoonnummer invult in **Contacten**.

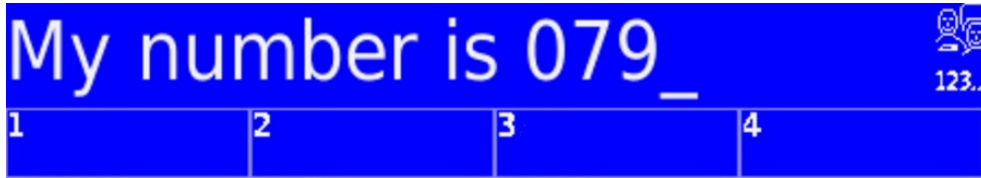

My number is 079\_


Mijn nummer is 079\_

Let op: Voorspellingen kunnen niet direct geselecteerd worden met de nummertoesen wanneer u zich in **Nummermodus** bevindt. Druk gewoon op de **123...** toets om het weer uit te schakelen (of gebruik de **Verder**, **Terug** en **Uitvoeren** toetsen om te markeren en selecteer voorspellingen).

### Symbolen en leestekens typen

Veel gebruikte leestekens en symbolen worden getoond op de nummertoesen in oranje, en kunnen gemakkelijk gebruikt worden door de **Shift Toets** in te drukken gevolgd door de van toepassing zijnde nummertoes.

Om leestekens of symbolen in te voeren die niet getoond worden op het toetsenbord, druk op **Shift-Kiezen** om het symboolmenu te zien.

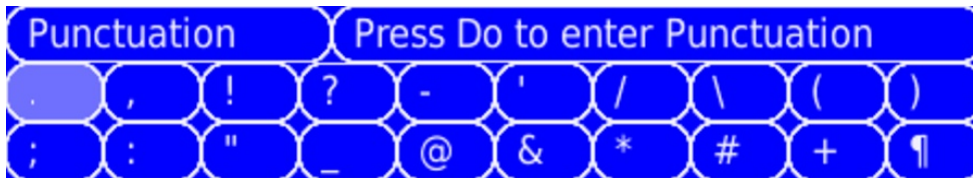

Punctuation Press Do to enter  
Punctuation

Leestekens Druk op Invoeren om  
Leestekens in te voeren

Gebruik de **Verder** en **Terug** toetsen om voorbeelden te zien van de symbolen in iedere groep. Wanneer u de groep vindt die u nodig heeft, druk dan op **Uitvoeren** om te selecteren en dan op **Verder** en **Terug** om het specifieke symbool te selecteren om in te voeren. U kunt ook de nummer snelkoppelingen gebruiken om de groep te selecteren en dan de symbolen te kiezen uit de bovenste rij.

### Hoofdletters typen

Om een hoofdletter te typen, druk op **Shift** gevolgd door de lettertoets die u in hoofdletters wilt typen.



Als u meerdere hoofdletters wilt typen (bv. NOS of KNVB), kunt u **Caps Lock** aanzetten door **Shift** twee keer in te drukken. Alles wat u typt zal in hoofdletters verschijnen tot u opnieuw op **Shift** drukt. Een hoofdletter A symbool zal rechts op het scherm verschijnen om u eraan te herinneren dat uw caps lock aan is. Zie **Geavanceerde Instellingen** voor meer informatie.

### Tekst verplaatsen

Indien u een eerder woord in uw tekst wilt bewerken, druk dan op **Shift-Verder** of **Shift-Terug** om Navigatie-lock te activeren. U kunt uw dan **Verder** of **Terug** gebruiken om de cursor naar links of rechts te bewegen in uw tekst. Wanneer u bij het punt komt dat u wilt bewerken drukt u een willekeurige toets in om Navigatie-lock uit te schakelen en typt dan om letters in te voegen, of druk op **Terug** om letters te wissen.



Rechts op het scherm wordt een terug of verder pijlsymbool getoond om u te vertellen dat de Navigatie-lock actief is.

### Ongedaan maken functie

Als u een fout maakt, bijvoorbeeld het per ongeluk wissen van de hele Gesprekszin met **Aan/C**, dan kunt u deze terugzetten door te drukken op **Shift-Aan/C**, dat altijd uw laatste actie ongedaan maakt. Het kan ook worden gebruikt om alles te verwijderen dat u zojuist hebt ingevoerd, of om een auto-correctie ongedaan te maken, of een uitbreiding van een afkorting, of de selectie van een voorspelling. U kunt ongeveer uw 25 laatste invoeracties ongedaan maken door herhaaldelijk op **Shift-Aan/C** te drukken.

### Doorsturen als SMS

Als u een **Gespreks-**regel als een **SMS** bericht wilt versturen, druk dan op **Menu** en kies **Doorsturen als SMS**. U heeft dan de mogelijkheid om het bericht te bewerken en een contact te kiezen aan wie u het wilt sturen. Zie de **SMS-** activiteit voor meer bijzonderheden.

### Tweede gesprek

De tekst die u typt in **Gesprek** zal gewoonlijk op het weergavescherm verschijnen. Als u een privé-bericht alleen op uw scherm wilt weergeven, druk dan op **Menu** en kies **Tweede Gesprek** modus. Alle tekst uit de hoofd **Gespreks-**activiteit (**Eerste Gesprek**) blijft op het weergavescherm en u krijgt een nieuw blanco **Gespreks-** scherm waarop u een privé-bericht kunt typen.



This is private\_

Dit is privé\_

Om deze tekst privé te houden, worden de woord en zin spraakmodi gedeactiveerd in het **Tweede Gesprek**, dus u moet Uitvoeren indrukken om uw tekst hier te laten spreken.

Om terug te keren naar uw originele gesprek drukt u op **Menu** en kiest **Eerste Gesprek**. Alle eerder ingevoerde tekst zal zijn opgeslagen, net als alle tekst die u in uw Tweede Gesprek achterlaat.



## SMS-berichten

U kunt uw Lightwriter gebruiken om een SMS tekstbericht te versturen met de mobiele telefoonfunctie.

U kunt de SIM-kaart van een mobiele telefoon gebruiken of een aparte SIM-kaart kopen alleen voor uw Lightwriter. Om de SIM-kaart te vervangen zie **Installeren van een SIM-kaart**.



Select an SMS  
Send SMS/ Inbox/ Outbox

Kies een SMS  
Verstuur SMS/ Postvak IN / Postvak  
UIT

### Signaalindicator

U kunt zien of uw Lightwriter een voldoende sterk signaal ontvangt om sms-berichten te versturen of te ontvangen door naar het SMS-pictogram op de activiteitenbalk te kijken. Het kan maximaal 30 seconden duren voordat het sms-pictogram is bijgewerkt na het starten van uw Lightwriter. De sterkte van het signaal wordt aangegeven door de streepjes als hieronder getoond:



Lightwriter ontvangt signaal.



Lightwriter ontvangt geen signaal. Maak u niet ongerust; ieder bericht dat u maakt wordt opgeslagen en verzonden wanneer het signaal voldoende sterk is.



Geen SIM-kaart geïnstalleerd in uw Lightwriter. SMS zal niet werken zonder een sim-kaart.

### Een SMS tekstbericht versturen

Kies in de **SMS-activiteit Nieuwe Toevoegen** en typ uw bericht.

Druk op **Uitvoeren** om te bevestigen en volg de instructies op het scherm.

1. Kies een contact of voer een nieuw nummer in.

2. Bevestig de gegevens om te verzenden.

Druk op **Aan/C** op ieder gewenst moment om de tekst te wissen en naar het vorige scherm te gaan.

Als u een bericht verstuurt aan een nieuw nummer, dan zal u automatisch gevraagd worden of u dat nummer op wilt slaan in uw lijst met contacten. Typ gewoon een naam voor dat nummer en druk op **Uitvoeren**.

**Snelle tip**

Alle hulpmiddelen voor het typen die u kent van **Gesprek** werken wanneer u een sms-bericht schrijft, bv. voorspellingen, zinnen, afkortingen, symbolen enz.

**Postvak IN**

Het Postvak IN bevat een lijst van sms-berichten die u heeft ontvangen.

Beweeg tussen de berichten met de **Verder** en **Terug** toetsen en druk op **Uitvoeren** om er een weer te geven. Gebruik **Verder** en **Terug** om door het bericht te bladeren.

Om het bericht te spreken druk op **Shift-Uitvoeren**.

• **Dingen die u kunt doen met berichten in uw Postvak IN**

Druk op **Menu** om de lijst van dingen te zien die u kunt doen met de geselecteerde Postvak IN berichten.

- **Reageer op sms-bericht**

Hiermee kunt u een reactie schrijven aan de zender van het bericht dat u momenteel bekijkt.

- **Kopiëren naar Gesprek**

Dit zal de inhoud van het tekstbericht versturen naar **Gesprek** voor bewerking, spreken of doorsturen als een nieuwe sms.

- **SMS Wissen**

Wist het bericht permanent uit het Postvak IN U zult gevraagd worden om dit te bevestigen voordat het bericht wordt gewist. Eenmaal bevestigd kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

- **Contact toevoegen**

Voegt de zender van het bericht toe aan uw lijst met contacten. U ontvangt een prompt om een unieke naam in te vullen voor dit contact.

**Postvak UIT**

Het Postvak UIT bevat een lijst van berichten die u heeft verstuurd.

Beweeg tussen de berichten met de **Verder** en **Terug** toetsen en druk op **Uitvoeren** om er een te bekijken. Gebruik **Verder** en **Terug** om door de tekst van het bericht te bladeren.

Om het bericht te spreken druk op **Shift-Uitvoeren**.

• **Dingen die u kunt doen met berichten in uw Postvak UIT**

Druk op **Menu** om de lijst van dingen te zien die u kunt doen met de

geselecteerde berichten in Postvak UIT.

- **SMS doorsturen**

Hiermee kunt u een bericht dat u momenteel bekijkt doorsturen aan een nieuwe ontvanger. U heeft de mogelijkheid om het bericht te bewerken voordat u het verstuurt.

- **Kopiëren naar Gesprek**

Dit zal het bericht kopiëren naar [Gesprek](#) voor bewerken, spreken of doorsturen als een nieuwe sms.

- **SMS Wissen**

Wist het bericht permanent uit het Postvak UIT U zult gevraagd worden om dit te bevestigen voordat het bericht wordt gewist. Eenmaal bevestigd kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

- **Contact toevoegen**

De persoon aan wie u het sms-bericht hebt verstuurd kan worden toegevoegd aan uw lijst met contacten. U wordt gevraagd om een unieke naam in te vullen voor dit contact.

### **Beltegoed SIM-kaart opwaarderen**

De SIM-kaart die met uw Lightwriter wordt geleverd heeft al €10.00 beltegoed – genoeg voor ongeveer 100 berichten. Maar, wanneer dit op is dient u uw beltegoed op te waarderen. Om dit te doen, neemt u de opwaardeerkaart die bij uw Lightwriter werd geleverd naar iedere willekeurige winkel die een opwaardeerfaciliteit heeft. Omdat u geen stemgesprekken kunt maken met uw Lightwriter is het niet mogelijk om andere opwaardeermethoden te gebruiken zoals e-tegoedbonnen. Zie de bijgeleverde gebruikershandleiding voor de SIM-kaart voor meer informatie. Let op, u hoeft SIM-kaarten met een maandelijks contract niet op te waarderen.



## Contacten

Deze activiteit is als een telefoonboek. Hier kunt u de namen en telefoonnummers opslaan van mensen die u kent.

### Nieuwe nummers toevoegen

In de activiteit Contacten kies **Nieuwe toevoegen**.

Type na de prompt een naam en een nummer in. Als de naam die u gekozen hebt al in de contactenlijst staat wordt u gevraagd om een alternatief te kiezen. Iedere naam dient uniek te zijn. Druk **Uitvoeren** om terug te gaan naar het invoerscherm om de naam te bewerken en probeer opnieuw.


### Snelle tip

Uw Lightwriter wordt geleverd met het nummer van Toby Churchill Ltd. technische hulp opgeslagen. U kunt ons een sms tekstbericht sturen voor hulp (vergeet niet een mobiel of een vast nummer te vermelden in uw bericht voor antwoord.)

### De weg vinden in uw contacten

Om snel door uw contacten te bladeren, begin met het typen van de naam van het contact dat u wenst te vinden.

De namen van al uw contacten die beginnen met die letters worden weergegeven en u kunt dan de **Verder** en **Terug** toets gebruiken om het contact te selecteren dat u wilt.

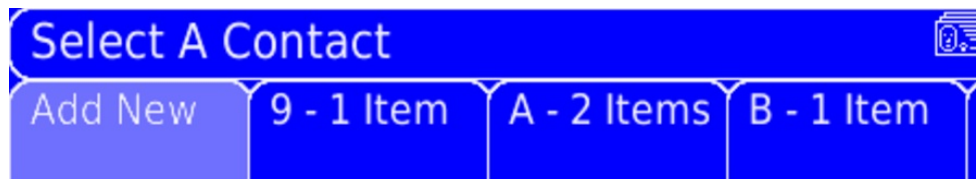

Select A Contact

Add New 9-1 Item A-2 Items B-1 Item

Selecteer een contact

Nieuwe Toevoegen 9-1 Item A-2 Items B-1 Item

Of u kunt de **Verder** en **Terug** toetsen gebruiken om de alfabetische tabs te selecteren in het eerste Contacten scherm.

### Dingen die u kunt doen met uw nummers

Kies een contact en druk op **Menu** voor de volgende opties:



Toby Churchill +447518037058  
Edit Contact/ Send SMS/ Delete Contact/  
Use Details


Toby Churchill +447518037058  
Contact Bewerken/ SMS Versturen/  
Contact Wissen/ Gebruikersgegevens/

#### • Contact bewerken

U kunt zowel de naam als het nummer van een contact bewerken.

Kies welke u wilt bewerken en breng dan de veranderingen aan.

Gebruik **Shift-Verder** of **Shift-Terug** om bestaande tekst of nummers te bewerken op dezelfde manier als waarop u sprekende tekst bewerkt. Druk op **Uitvoeren** om wijzigingen te bevestigen.

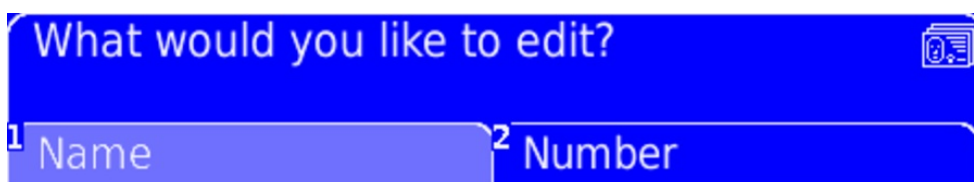

What would you like to edit?  
Name/ Number

Wat wilt u bewerken?  
Naam/ Nummer

#### • SMS versturen


Dit zal een SMS aan het huidige contact sturen. Typ uw bericht en bevestig de gegevens om te verzenden.

#### • Contact wissen

Dit verwijdert het huidige contact uit de lijst. U wordt gevraagd om dit te bevestigen voordat het contact wordt gewist. Eenmaal bevestigd kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

#### • Gebruiksgegevens

Dit geeft u de volgende opties:

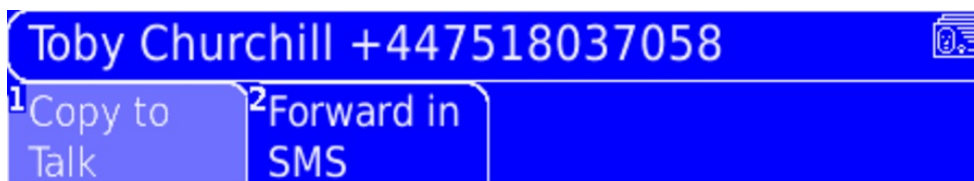

Toby Churchill +447518037058  
Copy to Talk/ Forward in SMS

Toby Churchill +447518037058  
Kopiëren naar Gesprek/ Doorsturen in  
SMS

#### • Kopiëren naar Gesprek

De naam en het telefoonnummer van het contact kunnen op de berichtregel in **Gesprek** worden geplaatst zodat ze gesproken kunnen worden.

#### • Doorsturen in SMS

De naam en het nummer kunnen worden gekopieerd naar een nieuw berichtsscherm zodat u de gegevens aan iemand op kan sturen. U kunt ook een bericht toevoegen vóór het versturen. Druk op **Uitvoeren** om een contact te kiezen of typ een nummer, en druk op **Uitvoeren** om te bevestigen en verstuur uw bericht.



## Notitieboekje

Het notitieboekje kan worden gebruikt om langere teksten op te slaan, te bewerken of te spreken. Het geheugen is groot genoeg om uw eerste roman te bevatten!



Select a Note	Selecteer een Notitie
Add New/ A-1 Note/ D-2 Notes/ E-1 Note	Nieuwe Toevoegen/ A-1 Notitie/ D-2 Notities/ E-1 Notitie


### Een notitie schrijven

In de activiteit Notitieboekje kies **Nieuwe toevoegen** en typ uw tekst. Wanneer u klaar bent, druk op **Uitvoeren**. U krijgt een prompt om de notitie een titel te geven. Wanneer u klaar bent drukt u op **Uitvoeren** om de notitie op te slaan.

Let op: Als u ervoor kiest om geen titel te geven, dan zal de Lightwriter automatisch de eerste paar woorden van uw notitie gebruiken. In Notitieboekje zijn woordvoorspelling, uitbreidingen en auto-correctie beschikbaar terwijl u typt. Het is zeer belangrijk om leestekens te gebruiken om de tekst op te breken, vooral als u de tekst laat spreken. Om de alinea's in uw tekst te markeren is een alinea-eindeteken ¶ beschikbaar in de symbolenpagina door middel van **Shift-Kiezen**.

### Notities bekijken en spreken

U kunt door notities bladeren en deze spreken met de **Verder**, **Terug** en **Uitvoeren** toetsen. Tekst die dubbel onderstreept is wordt gesproken wanneer u op **Uitvoeren** drukt. Wanneer u op **Uitvoeren** drukt, zal de onderstreping automatisch verder gaan naar het volgende te spreken tekstgedeelte. U kunt tekst overslaan of tekst herhalen met de **Verder** en **Terug** toetsen.

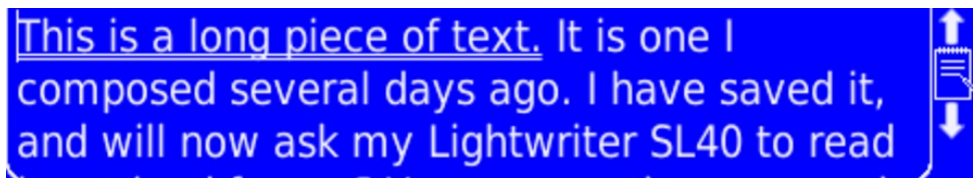

This is a long piece of text. It is one I composed several days ago. I have saved it and will now ask my Lightwriter SL40 to read	Dit is een lang stuk tekst. Ik heb het een paar dagen geleden geschreven. Ik heb het opgeslagen en zal nu mijn Lightwriter SL40 vragen het te lezen
---	---

Om de manier waarop de tekst gesproken wordt te wijzigen, zie **Spreekstijl** hieronder.

### Dingen die u kunt doen met uw notities

Wanneer u een notitie hebt geselecteerd, druk op **Menu** om de volgende opties te zien:

- **Notitie bewerken**

Dit stelt u in staat om de tekst van uw notitie te bewerken. Gebruik **Shift-Verder** en **Shift-Terug** om door uw tekst te bewegen. Bevestig uw wijzigingen met **Uitvoeren**.

- **Titel bewerken**

Gebruik deze optie om de titel van uw notitie te corrigeren of te wijzigen.


- **Notitie wissen**

Deze optie verwijdert de huidige notitie van uw Lightwriter.

U zult gevraagd worden om dit te bevestigen voordat de notitie wordt gewist. Eenmaal bevestigd kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

### Gespreksmodus

Hier kunt u de hoeveelheid tekst instellen die gemarkeerd wordt en op een bepaald moment wordt gesproken. Wanneer u op **Uitvoeren** drukt wordt altijd de tekst gesproken die gemarkeerd is

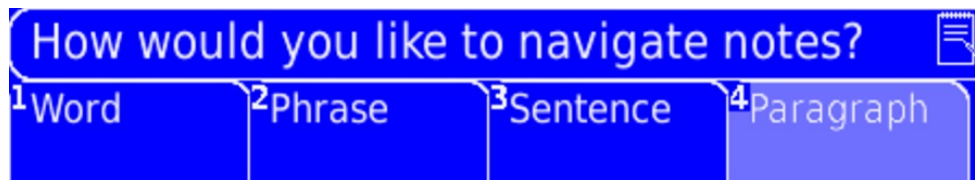

How would you like to navigate notes?  
Word/ Phrase/ Sentence/ Paragraph

Hoe wilt u door notities navigeren?  
Woord/ Zinsnede/ Zin/ Alinea

U kunt een van de volgende opties kiezen:

- **Woord**

Ieder woord wordt apart gemarkeerd, gescheiden door spaties.

- **Zinsnede**

Iedere zinsnede wordt gemarkeerd; zinsnedes eindigen bij ieder leesteken, inclusief komma's en alinea-eindetekens.

### Snelle tip

U kunt Notities voor veel dingen gebruiken. U kunt een toespraak willen houden, of een kort stukje voorbereiden over uzelf voor een sollicitatiegesprek. Of, misschien wilt u enkele symptomen noteren voordat u naar de dokter gaat.


- **Volzin**

Iedere volzin wordt gemarkeerd. Volzinnen eindigen bij leestekens als . ! ? en alinea-eindetekens ¶.

- **Alinea**

Iedere alinea wordt gemarkeerd. Alinea's eindigen bij een alinea-eindeteken (¶), dat kan worden ingevoerd door op **Shift-Kiezen** te drukken en dit te selecteren uit het leestekenmenu.

Iedere keer dat u op **Verder** of **Terug** drukt zal het geselecteerde tekstgedeelte worden gemarkeerd. Op **Uitvoeren** drukken zal dat tekstgedeelte spreken.

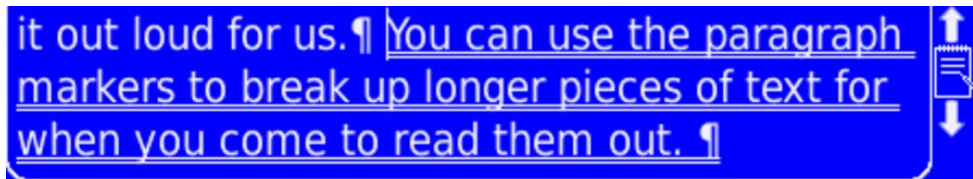

it out loud for us, ¶ You can use the paragraph markers to break up longer pieces of text for when you come to read them out. ¶

het hardop voor ons. ¶ U kunt de alinea-eindetekens gebruiken om langere stukken tekst op te breken om ze voor te lezen. ¶



## Afstandsbediening

U kunt uw Lightwriter gebruiken om toepassingen speelgoed en sommige huisbeheersystemen te bedienen die gebruik maken van infra-rood bediening. (Er zijn enkele uitzonderingen, met name sommige audio-visuele apparatuur met zeer hoge specificaties).

U kunt maximaal acht verschillende opdrachten opslaan.



TV CH-/ TV Ch+/ TV Vol-/ TV Vol+	TV Kan-/ TV Kan+/ TV Vol-/ TV Vol+
CD On/Off/ CD Vol-/ CD Vol+/ TV On/Off	CD Aan/Uit/ CD Vol-/ CD Vol+/ TV Aan/Uit

### Een opdracht opslaan

Er zijn geen vooraf ingestelde opdrachten voor afstandsbediening opgeslagen in de Lightwriter.

U dient de Lightwriter de opdrachten te leren die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld **volume harder** voor uw TV.

In de **Afstandsbediening** activiteit selecteer **Nieuwe Toevoegen** en richt uw afstandsbediening op uw Lightwriter.



Add New

Nieuw Toevoegen (abbr.= Toev.)

Druk op **Uitvoeren** op uw Lightwriter om te beginnen de opdracht te registreren en druk dan op de knop die u wilt registreren op uw afstandsbediening, bijvoorbeeld de **volume harder** knop op de afstandsbediening van uw TV. Wanneer de registratie succesvol was wordt u gevraagd om de opdracht opnieuw te registreren om er zeker van te zijn dat deze correct is geregistreerd is. U heeft de optie om de opdracht te testen voor deze wordt opgeslagen. (Dit wordt aanbevolen).



Indien de registratie niet succesvol was, heeft u de optie om de opdracht opnieuw te registreren. Let op: zorg ervoor dat uw afstandsbediening op de sensor is gericht, rechts op het weergavescherm van de gebruiker, vanaf niet meer dan 1 cm afstand.

Nadat een opdracht succesvol is geregistreerd, dient u het een naam te geven en op te slaan. Om verwarring te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat iedere naam duidelijk en uniek is; gebruik bijvoorbeeld **TV vol. +** en **Stereo vol. +** in plaats van alleen maar **vol. +**.

### Een opdracht verzenden

Om een opdracht te verzenden, markeer het in het hoofdscherm afstandsbediening en druk op **Uitvoeren**. Zorg ervoor dat het weergavescherm van uw Lightwriter wijst naar het apparaat dat u wilt bedienen.

### Dingen die u kunt doen met uw opdrachten

Markeer een opdracht en druk op **Menu** voor de volgende opties:



CD Vol-  
Re-record Code/ Rename Code/ Delete  
Code

CD Vol -  
Code opnieuw Registreren/ Naam Code  
Wijzigen/ Code Wissen

#### • Opnieuw code registreren

Als u uw TV vervangt, wilt u misschien de **TV vol. +** opdracht voor uw nieuwe toepassing opnieuw registreren. De stappen zijn hetzelfde als voor het registreren van een opdracht, behalve dat u niet gevraagd wordt om de opdracht een naam te geven.

#### • Naam opdracht wijzigen

Hier kunt u opdrachten die u al geregistreerd heeft een nieuwe naam geven.

#### • Opdracht wissen

Dit zal de opdracht wissen van uw Lightwriter. U wordt gevraagd dit te bevestigen voordat de opdracht gewist wordt. Eenmaal bevestigd kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

#### Snelle tip

Als u problemen hebt met het registreren van een opdracht, probeer dan om het licht te dimmen of de gordijnen dicht te doen. Opdrachten registreren kan gevoelig zijn voor licht.



## Alarmen

U kunt vier alarmen instellen voor uw Lightwriter om u te herinneren aan gebeurtenissen, afspraken of zelfs om u 's morgens te wekken! Deze kunnen tot op een week van tevoren worden ingesteld en kunnen ieder een verschillend geluid en bericht hebben, bijvoorbeeld tijd voor thee. Wanneer een alarm eenmaal af is gegaan wordt het automatisch gewist.



Now: Sunday, 14 Sep. 12:34:56  
Add New

Nu: zondag, 14 sept. 12:347:56  
Nieuwe Toevoegen

### Een herinnering instellen

In **Alarmen** kies **Nieuwe toevoegen** en volg de onderstaande stappen:

- Stel eerst de tijd voor het alarm in. Eerst wordt het uur gemarkeerd. Gebruik de **Verder** en **Terug** toetsen om naar het juiste uur te gaan (24-uur klok).

Druk op **Uitvoeren** om te bevestigen en herhaal deze handelingen voor de minuten. Let op: u kunt op **Kiezendrukken** om de minuten of uren terug te zetten op de huidige tijd.

### Snelle tip

Wanneer **Nieuwe Toevoegen** gemarkeerd is, wordt de huidige dag en tijd getoond.. Zorg ervoor dat deze correct zijn voor u het alarm instelt. Ze kunnen worden gewijzigd in het Informatiemenu in Instellingen.



07:30/ Select Alarm Time (Hour:Minute)  
Done

07:30/ Selecteer Alarmtijd (Uur:Minuut)  
Gereed

- Daarna dient u een dag voor uw alarm te selecteren. De huidige dag van de week wordt gemarkeerd. Gebruik **Verder** en **Terug** om de juiste dag te selecteren en druk dan op **Uitvoeren** om te bevestigen.



Sunday	Select a Day	zondag	Kies een Dag
Monday		maandag	
Tuesday	Done	dinsdag	Gereed

- Kies dan het herinneringssignaal met de **Verder** en **Terug** toetsen om door de **geluiden** te bladeren. U kunt dit instellen op **Geen geluid** als u geen hoorbare herinnering wilt horen. Om een geluid te horen voordat u het selecteert, druk op **Uitvoeren**. Wanneer u een geluid gekozen hebt, drukt u op **Uitvoeren** om te bevestigen.
- U kunt een herinneringstekst toevoegen aan uw alarm, bijvoorbeeld **tandarts afspraak of tijd om te zwemmen**. De herinnering kan ook leeg worden gelaten. Druk op **Uitvoeren** om de ingestelde tekst te bevestigen en het alarm op te slaan.



Wake up!!!	Reminder text	Wakker worden!!!	Herinneringstekst
------------	---------------	------------------	-------------------


Bij het instellen van een alarm kunt u op ieder moment op **Aan/C** drukken om terug te keren en het vorige scherm te bewerken.



15 Sep. - Wake Up!!!	15 sept. - Wakker worden!!!
Add New Monday 07:30	Nieuwe Toevoegen maandag 07:30

**Dingen die u kunt doen met uw alarmen**

Druk in **Menu** op een gemarkeerd alarm om de onderstaande opties te zien:

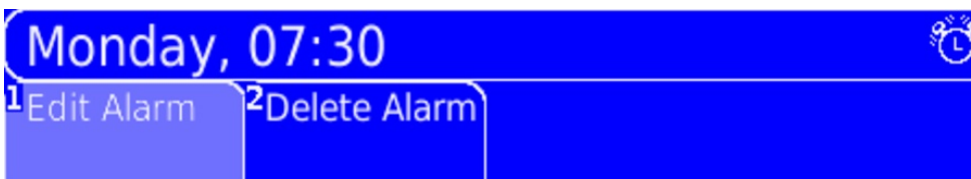

Monday, 07:30	maandag, 07:30
Edit Alarm/ Delete Alarm	Alarm bewerken/ Alarm Wissen

- **Alarm bewerken**

U kunt de tijd, dag, het geluid of de tekst voor een alarm wijzigen. Selecteer het item dat u wilt bewerken met de **Verder** en **Terug** toetsen en druk op **Uitvoeren**. De waarden van een item wijzigen met de bovenstaande methoden in **Een herinnering instellen**, en druk op **Uitvoeren** om te bevestigen en terug te keren naar het alarm menu.



Monday, 07:30

Edit Time/ Edit Date/ Edit Sound/ Edit  
Text

maandag, 07:30

Tijd Bewerken/ Datum Bewerken/ Geluid  
Bewerken/ Tekst bewerken

- **Alarm wissen**

Dit verwijdert een bepaald alarm van uw Lightwriter. U zult gevraagd worden om dit te bevestigen voordat het alarm wordt gewist. Eenmaal bevestigd kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

**Snelle tip**


Herinneringen die gedaan zijn worden automatisch gewist, dus u hoeft geen alarmen te wissen die al geactiveerd werden.

## Instellingen en Snelkoppelingen



Uw Lightwriter heeft een aantal instellingen opties waarmee u uw machine kunt aanpassen.

De Instellingen zijn georganiseerd in acht groepen zodat u makkelijk de instelling kunt vinden die u wilt.

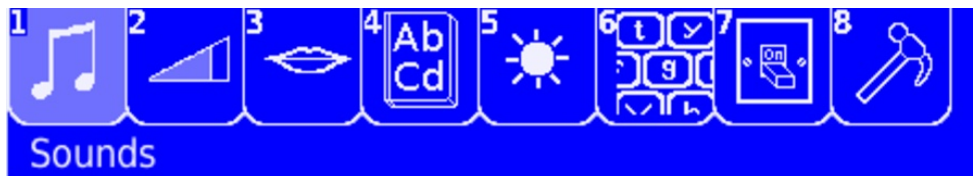

Geluiden    Volume    Spraak    Woordgeheugen    Weergave    Toetsenbord    voeding    Informatie

Sounds

Geluiden

De meest gebruikte instellingen zijn gemakkelijk toegankelijk via de Snelkoppelingen activiteit. Gebruik de **Helpende Hand** om deze Instellingen te zien:



- Nu onderbreken
- Stille modus
- Spraakvolume
- Nu back-uppen

Vergeet niet om **Shift-Menu** te gebruiken op ieder scherm om snel het spraakvolume en de helderheid van de schermen bij te kunnen stellen.



Speech Volume +/ Speech Volume-      Spraakvolume+ / Spraakvolume-/  
Display Brightness+ / Display Brightness -      Helderheid Weergavescherm+ /  
Helderheid Weergavescherm-

### Instellingen beheren

Om een instelling te wijzigen dient u eerst de groep te vinden waar deze zich bevindt. Dit is vrij gemakkelijk, bijvoorbeeld **spraakvolume** is in de **volume** groep. Maak u vertrouwd met de instellingen door de onderstaande stappen te volgen:

Selecteer een **Instellingen groep** door de **Verder** en **Terug** toetsen te gebruiken om de gewenste tab te markeren, en druk op **Uitvoeren**, of het nummer dat getoond wordt in de tab. U kunt dan de specifieke instellingen die u wilt op dezelfde manier selecteren.

Voor audio-opties als geluiden, volume en spraak kunt u de opties testen door ze te selecteren en dan **Shift-Do** in te drukken.

Uw Lightwriter wordt geleverd met alle instellingen al ingesteld op een bepaalde keuze wanneer het de fabriek verlaat (de 'fabrieksinstellingen'). Als u op enig moment de fabrieksinstellingen wilt herstellen, druk dan gewoon op **Kiezen** wanneer u in die instelling bent.

### Geavanceerde instellingen

Voor het vereenvoudigen van de **Instellingen** activiteit zijn sommige, meer ingewikkelde instellingen ondergebracht bij Geavanceerde Instellingen. Dit zijn instellingen die bijna nooit gewijzigd hoeven te worden. U kunt kiezen of u wel of niet deze instellingen weer wilt laten geven door Geavanceerde Instellingen **Aan** of **Uit** te zetten in de Informatie groep. De fabrieksinstelling is **Uit**. Eenmaal **Aan** zullen de Geavanceerde instellingen automatisch in alle groepen worden weergegeven (maar niet alle groepen hebben Geavanceerde Instellingen).

### Instellingengroepen

Hieronder volgt een overzicht van iedere instelling die beschikbaar is op uw Lightwriter. De waarden tonen alle mogelijke instellingen voor die Instelling, met de fabrieksinstelling gemarkeerd als **vetgedrukt**.



### Geluiden

Voor ieder van deze instellingen krijgt u een lijst van 14 verschillende geluiden om uit te kiezen. Gebruik **Verder** en **Terug** om door de lijst te bladeren, en **Uitvoeren** om te bevestigen en op te slaan. Drukken op **Shift-Uitvoeren** laat u het huidige geselecteerde geluid horen.

Naam instelling	Beschrijving	Waarden
Zoemgeluid	Dit is het geluid dat hoorbaar is wanneer u de zoemtoets indrukt.	<b>4piepjes</b>
SMS Ontvangstgeluid	Dit is het meldingssignaal wanneer u een SMS-bericht ontvangt.	<b>OP</b>
Alarm geluid	Dit is het geluid dat u laat weten dat de batterij bijna leeg is, of er systeemfouten zijn, etc.	<b>4piepjes</b>
Shift-Zoemgeluid	Dit is een alternatief voor uw eerste Zoemgeluid en speelt wanneer u <b>Shift-Zoem</b> indrukt.	<b>4piepjes</b>



## Volumes

Alle volume-instellingen hebben een wig weergave die het huidige volumenniveau aangeeft. Indien de wig leeg is (d.w.z. niet gedeeltelijk gevuld), dan zal die instelling stil zijn. Als de wig helemaal gevuld is staat deze op het maximum volume.

Gebruik **Verderen** om het niveau te veranderen, en **Uitvoeren** om te bevestigen en op te slaan.



Speech Volume  
Done

Spraakvolume  
Gereed

Naam instelling	Beschrijving	Waarden
Spraakvolume	Stelt het volumenniveau in van de hoofd spreektoon in de <b>Gesprek</b> en <b>Notitieboekje</b> activiteiten. U kunt ook het Spraakvolume regelen met de Shift-Menu snelkoppeling op ieder scherm.	<b>50%</b>
Stille modus	Dit zet alle Lightwriter geluiden uit <i>behalve</i> de Zoem en Shift-Zoem toetsen, voor gebruik tijdens examens, bioscoop, enz.	Aan/Uit
Zoemvolume	Stelt het volume in van de Zoemtoets.	<b>80%</b>
Toetsklikvolume	Stelt het volume in van de toetsenbord klik.	<b>60%</b>


### Geavanceerde volume-instellingen

Volume prompt	Past het volume aan van de gebruikte stem wanneer u <b>Shift-Uitvoeren</b> indrukt.	<b>60%</b>
Meldingvolume	Stelt het volume in van meldingen zoals bij het ontvangen van een sms en een bijna lege batterij enz.	<b>60%</b>
Alarmlvolume	Stelt het volume in van Alarmmeldingen.	<b>60%</b>
Shift-Zoemgeluid volume	Past het volume aan van het Zoem-geluid wanneer u <b>Shift-Zoem</b> indrukt.	<b>60%</b>



## Spraak

Deze instellingen hebben betrekking op de stemmen op uw Lightwriter.  
De meeste van deze instellingen worden weergegeven in een lijst, dus gebruik de **Verder** en **Terug** toetsen om door de opties te bladeren en druk op **Uitvoeren** om te selecteren en op te slaan. Spraaksnelheid en Promptsnelheid hebben vierkante weergaven die de snelheid van iedere stem aangeven.  
Indien niet gevuld, is de stem op zijn langzaamst, en wanneer volledig gevuld zal deze het snelst zijn.

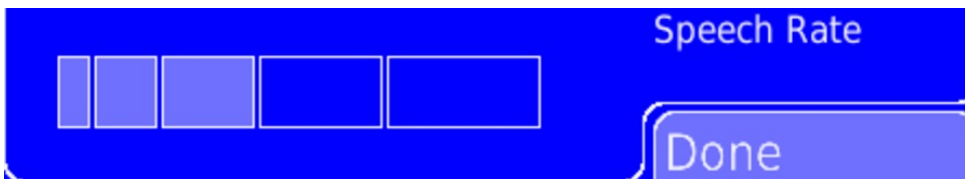

Speech Rate  
Done

Spraaksnelheid  
Gereed

Naam instelling	Beschrijving	Waarden
Spraakmodus	Wordt aangepast wanneer de woorden die u in <b>Gesprek</b> typt worden gesproken. Welke optie u ook kiest, indrukken van <b>Uitvoeren</b> spreekt altijd de gehele tekst. <b>Woord</b> – Spreekt ieder woord wanneer u er een spatie achter typt. <b>Zin</b> – Spreekt de hele zin nadat u een punt, vraagteken of uitroepeteken aan het eind hebt getypt . <b>Geheel</b> – Spreekt de hele tekst alleen nadat u de <b>Uitvoeren</b> toets hebt ingedrukt.	<b>Woord, Zin, Geheel</b>
Stem	Kies de hoofd spreekstem voor uw geselecteerde spreektaal.	
Spraaksnelheid	Wijzigt hoe snel de stem spreekt in de <b>Gesprek</b> en <b>Notitieboekje</b> activiteiten.	<b>60%</b>

## Geavanceerde Spraakinstellingen

Promptsnelheid	Past de snelheid aan van de gebruikte spraak wanneer u <b>Shift-Uitvoeren</b> indrukt.	<b>60%</b>
Tekst.	Dit wijzigt de taal van alle teksten op het scherm, inclusief de labels voor de menu-onderdelen en meldingen. Kies Volg Taal om deze instelling de Taalinstelling te laten volgen.	
Taal	Dit wijzigt de taal van uw spreekstem en schakelt alle woordgeheugen items naar de gekozen taal.	



### Woordgeheugen

De instellingen voor Woordgeheugen geven toegang tot lijsten met woorden en zinnen die u kunt gebruiken in **Gesprek**, **SMS**, of **Notitieboekje** activiteiten. Voor meer informatie over woordgeheugen zie het kopje **Gesprek** of **Woordgeheugen Beheren** aan het eind van dit hoofdstuk.

Naam instelling	Beschrijving
Zinnengeheugen	Beheer uw Zinnengeheugen: toevoegen, bewerken, wissen.
Afk. Uitbreidingen	Beheer uw Afkorting Uitbreidingen: toevoegen, bewerken, wissen.
Auto-correcties	Beheer uw Auto-correcties: toevoegen, bewerken, wissen.
Spraakuitzonderingen	Beheer uw Spraakuitzonderingen: toevoegen, bewerken, wissen, spreken.

### Geavanceerde instellingen Woordgeheugen

Woordenboek	Beheer het huidige Gebruikerswoordenboek: toevoegen, bewerken, wissen, spreken.	
Woordvoorspelling	Instellen of voorspellingen en uitbreidingen van afkortingen worden getoond in de Gespreksactiviteit.	Aan / Uit



### Weergaveschermen

Met deze Instellingen kunt u instellen hoe de schermen aan de voor-en achterkant van de Lightwriter worden weergegeven. Wij raden aan dat de helderheidsniveaus meestal laag worden gehouden omdat anders de batterij eerder leeg kan raken.

Naam instelling	Beschrijving	Waarden
Helderheid Weergave	Stel de helderheid in van het weergavescherm dat u, de gebruiker, ziet. U kunt de helderheid ook regelen met de Shift-Menu snelkoppeling op ieder scherm.	20%
Helderheid Weergavescherm Gesprekspartner	Stel de helderheid in voor het weergavescherm aan de voorkant. Bij het instellen van het weergavescherm voor de gesprekspartner wordt de achtergrondverlichting van het scherm geactiveerd.	0%

### Geavanceerde Weergave-instellingen

Menunummers	Stelt in of er menunummers worden getoond bovenaan links in de menutabs. Let op dat u na het wijzigen van deze instelling de Lightwriter opnieuw moet booten (starten) voordat de nummers worden verwijderd.	Aan / Uit
Regels scherm gesprekspartner	Kies hoeveel regels tekst worden getoond op het weergavescherm van de gesprekspartner wanneer u typt in Gesprek.	1, 2, 3



### Toetsenbord

Het is belangrijk dat het gebruik van het toetsenbord een prettige ervaring is, daarom kunt u met deze instellingen bepalen hoe uw toetsen werken. Onthoud dat u door het indrukken van **Kiezen** de instelling altijd terug kunt zetten of de standaardwaarde.

Toets Vasthouden en Toetsvertraging kunnen helpen wanneer u moeite heeft om de toetsen accuraat aan te slaan of uw hand stil te houden. Het kan zijn dat het gebruik van een andere toetsenbordbescherming ook kan helpen (zie **Toetsenbord** hieronder).


Naam instelling	Beschrijving	Waarden
Toets vasthouden	Dit is de tijd dat u een toets vast moet houden voordat de invoer geaccepteerd wordt. Dit voorkomt dat ongewenste toetsindrukken worden geaccepteerd.	0–5 seconden(0) met toenamen van 0.1 seconden
Toetsvertraging	Dit is de tijd die verstrijkt nadat een toets is ingedrukt voordat het indrukken van een andere toets wordt geaccepteerd. Dit vertraagt het typproces maar helpt met doeltreffendheid en problemen met trillende handen, omdat het ongewenste herhaling van toetsen voorkomt.	0–5 seconden(0) met toenamen van 0.1 seconden

### Geavanceerde Toetsenbord-instellingen

Caps Lock Modus	Caps Lock stelt u in staat om de <b>Shift</b> toets twee keer in te drukken om meerdere hoofdletters in te voeren. Opnieuw op <b>Shift</b> drukken zal Caps Lock deactiveren.	Aan / Uit
Nav Lock Modus	Nav Lock Modus Nav slot stelt u in staat om Shift in te drukken, gevolgd door meerdere keren indrukken van <b>Verder</b> of <b>Back</b> om de cursor te kunnen bewegen zonder tekst te wissen. Dit is nuttig voor bewerken. Indien Nav Lock <b>Uit</b> staat, dient u de <b>Shift</b> in te drukken voor iedere handeling. Druk op iedere toets anders dan <b>Verder</b> of <b>Terug</b> om Nav Lock uit te schakelen.	Aan / Uit
Lay-out Toetsenbord	Dit stelt de lay-out van het toetsenbord in. Zie <b>Uw Toetsenbord Reinigen</b> voor informatie over het verplaatsen van toetsen. De onderstaande schema's tonen de toetsenindeling voor ieder van deze lay-outs.	<b>Rechts</b> <b>QWERTY</b> Rechts ABCDE Links QWERTY Links ABCDE
All Caps	Stelt de Gespreksactiviteit in om altijd hoofdletters weer te geven.	Aan/Uit

## Lay-outs Toetsenbord

Rechts qwerty

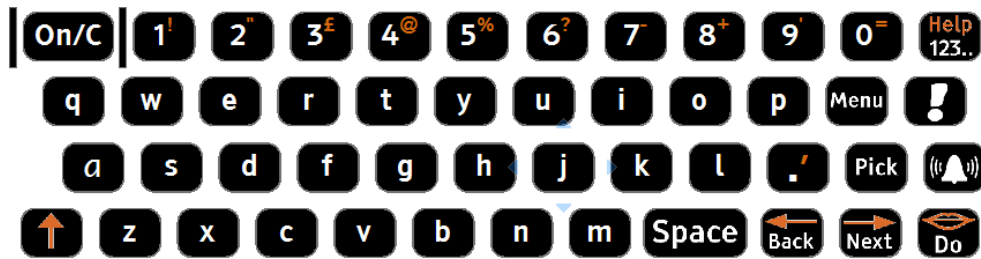

On/C/ Help123...

Menu

Pick

Space/Back/ Next/ Do

Aan/C/ help 123...

Menu

Kiezen


Spatie/ Terug/ Verder/ Uitvoeren

Rechts abcde



Er zijn ook versies van deze toetsenborden voor Linkshandig gebruik. In dit geval zijn de functietoetsen naar de linkerkant van het toetsenbord verplaatst:

Links qwerty

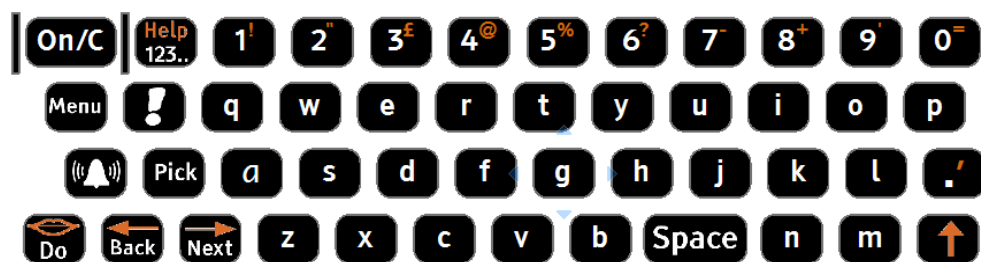

On/C/ help123...

Menu

Pick

Do/ Back/ Next/ Space


Aan/C/ help 123...

Menu

Kiezen

Uitvoeren/ Terug/ Verder/ Spatie

Links abcde

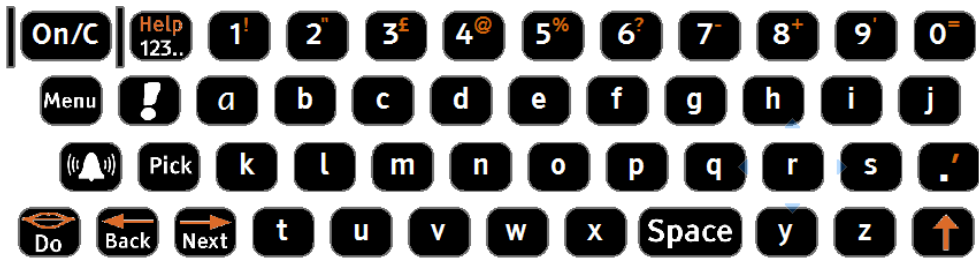



### Voeding

Deze instellingen bieden verschillende manieren om uw Lightwriter uit te zetten.

Naam instelling	Beschrijving	Waarden
Onderbrekingstijd	Stelt de tijdsduur in voordat uw Lightwriter automatisch onderbreekt als er geen toetsen worden ingedrukt. Deze tijd kort houden zal uw batterij sparen. Druk op <b>Aan/C</b> om uw Lightwriter weer te wekken.	15, <b>30 seconden</b> , 1,2,5,10 minuten
Voeding uit	Zet uw Lightwriter in een zeer lage voedingstatus en hoeft meerdere weken niet te worden opgeladen. Druk op <b>Aan/C</b> om uw Lightwriter te herstarten. Dit zal maximaal een minuut duren.	Bevestiging nodig
Transit modus	Onderbreekt Lightwriter en vergrendelt het toetsenbord (nuttig voor reizen). U dient de oplader aan te sluiten voordat u <b>On/C</b> indrukt om uit de Transit Modus te komen.	Bevestiging nodig
Ingebouwde Telefoon	Schakelt de ingebouwde telefoon aan of uit. Normaliter dient u deze uit te schakelen wanneer u een ziekenhuis bezoekt of aan boord van een vliegtuig.	<b>Aan / Uit</b>



### Informatie

Met deze instellingen kunt u verschillende informatie-onderwerpen instellen. Om **Alarmen** goed te laten werken is het belangrijk dat de datum en tijd correct zijn ingesteld.

Naam instelling	Beschrijving	Waarden
Tijd Instellen	Stelt de uren en minuten in door gebruik te maken van de <b>Verder</b> en <b>Terug</b> toetsen om te bladeren, en het indrukken van <b>Uitvoeren</b> om ieder onderdeel te bevestigen.	<b>Uur : Minuten</b> (24 uur klok)
Datum Instellen	Stelt de datum in, stel de dag, maand, en jaar in door gebruik te maken van de <b>Verder</b> en <b>Terug</b> toetsen om te bladeren, en het indrukken van <b>Uitvoeren</b> om ieder onderdeel te bevestigen.	<b>Dag/ Maand/ Jaar</b>
Over uw SL40	Geeft technische informatie over uw Lightwriter. U kunt om deze informatie gevraagd worden als u Technische Ondersteuning moet bellen.	
Geavanceerde instellingen	Schakelt Geavanceerde Instellingen aan of uit.	Aan/Uit


### Geavanceerde Informatie-instellingen

Backup	Dit slaat al uw huidige instellingen en voorspellingen op.	
First Run Wizard	Dit start de wizard, die een aantal basisinstellingen voor de machine uitvoert. Zie <b>First Run Wizard</b> voor meer informatie.	Nu Uitvoeren/Uitvoeren na herstart

## Woordgeheugen Beheren

(zie het hoofdstuk Gesprek voor meer informatie)

Het Woordgeheugen geeft toegang tot lijsten met woorden en zinnen die gebruikt worden bij het typen en spreken. Kies het geheugen dat u wilt veranderen met **Verder**, **Terug** en **Uitvoeren**.

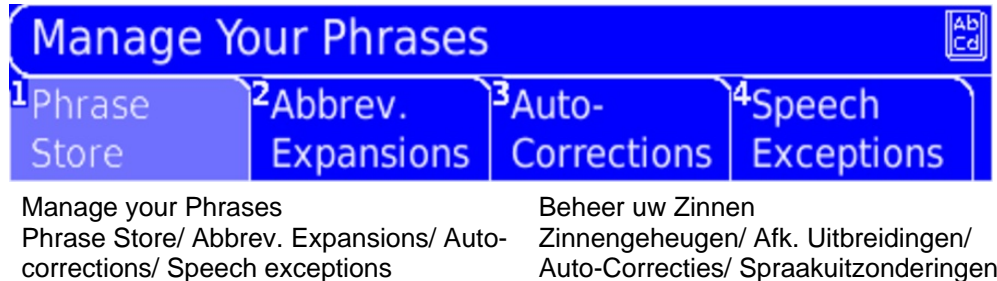

Let op: ieder woordgeheugen is gesorteerd in alfabetische groepen om het vinden van een woord of zin gemakkelijker te maken. U kunt ook het woord beginnen te typen dat u wilt vinden om een lijst met woorden weer te geven die beginnen met deze letters.

## Zinnengeheugen

Dit is waar de zinnen worden opgeslagen. Deze zinnen kunnen gebruikt worden door de **Kiezen** toets in te drukken in de activiteit Gesprek, SMS, of Notitie. De Lightwriter heeft al enkele zinnen opgeslagen in het geheugen. U kunt gemakkelijk de zinnen in dit geheugen wijzigen.

**U kunt een zin toevoegen:** Om een nieuwe zin te maken, selecteer **Nieuwe Toevoegen**. Voer uw nieuwe zin in en druk op **Uitvoeren** om te bevestigen en op te slaan.

**U kunt een opgeslagen zin wijzigen of wissen:** Selecteer een zin door deze te markeren met de **Verder** en **Terug** toetsen en dan op **Uitvoeren** te drukken. Kies dan de Bewerken of de Wissen tab.

**Zin Bewerken:** Typ de veranderingen, onthoud dat u **Shift-verder** en **Shift-Terug** kunt gebruiken om door de tekst te bladeren en correcties aan te brengen. Druk op **Uitvoeren** om op te slaan.

**Zin Wissen:** Verwijder de huidige zin uit de lijst door selectie van wissen en **Uitvoeren**. U wordt gevraagd dit te bevestigen voordat de zin wordt gewist. Eenmaal bevestigd kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

### **Uitbreidingen Afkortingen**

Dit is waar de uitbreidingen van uw afkortingen worden opgeslagen. Dit zijn snelle manieren om veel gebruikte zinnen of langere woorden weer te geven. Wanneer een afkorting in de Gespreksactiviteit wordt ingevoerd, dan zal de uitbreiding automatisch worden getoond in de voorspelling tabs voor gemakkelijke selectie en voorrang hebben boven andere voorspellingen.

**U kunt een uitbreiding van een afkorting toevoegen:** Om een nieuwe uitbreiding van een afkorting te maken, selecteer **Nieuwe Toevoegen**. Voer uw afkorting in (bv. tc) en druk op **Uitvoeren** om te bevestigen. Voer de volledige, uitgebreide zin of woord in (bv. Toby Churchill), en druk op **Uitvoeren** om op te slaan. Let op: u kunt veel verschillende woorden en zinnen opslaan met dezelfde afkorting, maar wij raden aan dat u niet het begin van een woord gebruikt als afkorting (bv. het is beter om hp dan ha te gebruiken voor Harry Potter).

### **U kunt een afkorting uitbreiding wijzigen of wissen:**

Selecteer een afkorting uitbreiding en druk op de Menu-toets.

**Afkorting Uitbreiding Bewerken:** Bewerk ofwel de afkorting of de uitbreiding voor een item. Selecteer welke u wilt bewerken uit het menu, maak veranderingen, en druk op **Uitvoeren** om op te slaan.

**Afkorting Uitbreiding Wissen:** Verwijder de huidige afkorting uitbreiding uit de lijst door wissen te selecteren en **Uitvoeren**. U wordt gevraagd om dit te bevestigen voordat de afkorting uitbreiding wordt gewist. Eenmaal bevestigd kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

**Auto-correcties**

Dit is waar uw auto-correcties worden opgeslagen. Auto-correcties automatische gecorrigeerde woorden die u regelmatig verkeerd typt. Wanneer u voortdurend een woord verkeerd typt, maak dan een auto-correctie en uw Lightwriter zal automatisch uw verkeerde spelling voor u corrigeren.

**U kunt auto-correcties toevoegen:** Om een auto-correctie te maken, selecteer **Nieuwe Toevoegen**. Voer eerst het verkeerd getypte of verkeerd gespelde woord in en druk op **Uitvoeren** om te bevestigen. Voer dan het woord in zoals u het gecorrigeerd wilt hebben. Typ dit met zorg in om er zeker van te zijn dat het correct is. Druk op **Uitvoeren** om op te slaan.

**U kunt auto-correcties wijzigen of wissen:** Selecteer een auto-correctie en druk op de **Menu**-toets.

**Auto-correctie Bewerken:** Bewerk ofwel de verkeerde spelling of de correctie voor een item. Selecteer welke u wilt bewerken uit het menu, maak veranderingen, en druk op **Uitvoeren** om op te slaan.

**Auto-correctie Wissen:** Verwijder de huidige auto-correctie uit de lijst door wissen te selecteren en dan **Uitvoeren**. U wordt gevraagd om te bevestigen voor de auto-correctie wordt gewist. Eenmaal bevestigd kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

### **Spraakuitzonderingen**

Dit is waar uw spraakuitzonderingen worden opgeslagen. Spraakuitzonderingen veranderen de manier waarop een woord wordt uitgesproken. Indien uw Lightwriter een woord niet zo uitspreekt als u wilt, maak dan een spraakuitzondering om de Lightwriter dit correct uit te laten spreken.

**U kunt Spraakuitzonderingen toevoegen:** Om een nieuwe spraakuitzondering te maken, selecteer **Nieuwe Toevoegen**, voor het woord in dat niet correct wordt uitgesproken en druk op **Uitvoeren**. Typ dan het woord in zoals u wilt dat het wordt uitgesproken. De juiste uitspraak invoeren kan soms moeilijk zijn. Probeer om het woord fonetisch in te voeren, of door streepjes of spaties toe te voegen om het woord op te breken in delen. Bijvoorbeeld, om Wijchen correct uit te laten spreken probeer Wiechen in te voeren. Onthoud u kunt **Shift-Uitvoeren** gebruiken om het woord te horen voordat u het opslaat. Druk op **Uitvoeren** om te bevestigen en op te slaan.

**U kunt spraakuitzonderingen wijzigen, wissen of spreken:** Selecteer een Spraakuitzondering en druk op de **Menu**-toets.

**Spraakuitzondering Bewerken:** Bewerk ofwel het verkeerd uitgesproken woord of de uitzondering. Selecteer welke u wilt bewerken uit het menu, maak veranderingen, en druk op **Uitvoeren** om op te slaan.

**Uitzondering Wissen:** Verwijder de huidige spraakuitzondering uit de lijst door wissen te selecteren en dan **Uitvoeren**. U wordt gevraagd dit te bevestigen voordat de spraakuitzondering gewist wordt. Eenmaal bevestigd kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

**Spraakuitzondering:** Spreek uw spraakuitzondering om te testen of de uitspraak correct is.

### **Woordenboek**

Dit is waar de woorden in uw woordenboek worden opgeslagen. Dit zijn woorden die voorspeld kunnen worden in de Gesprek, SMS en Notitieblok activiteiten.

**U kunt nieuwe woorden toevoegen:** Om een nieuw woord toe te voegen aan het woordenboek, selecteer **Nieuwe Toevoegen**. Voer uw woord in en druk op **Uitvoeren** om te bevestigen en op te slaan.

**U kunt woorden wijzigen of wissen:** Selecteer een woord en druk op de **Menu**-toets.

**Woord Bewerken:** Selecteer Woord Bewerken, maak veranderingen, en druk op **Uitvoeren** om op te slaan.

**Woord Wissen:** Verwijder het huidige woord uit de lijst door selectie van wissen en dan **Uitvoeren**. U wordt gevraagd dit te bevestigen voordat het woord wordt gewist. Eenmaal bevestigd kan dit niet ongedaan worden gemaakt. Let op: als u een woord wist zal het niet langer verschijnen in de voorspelling.

## Een SIM-kaart installeren

Uw Lightwriter wordt geleverd met een prepaid SIM-kaart geïnstalleerd. Als u echter de SIM wilt vervangen, volg dan de onderstaande instructies. Dit zou ongeveer drie minuten moeten duren, maar als u precieze handbewegingen moeilijk vindt, dan moet u misschien om hulp vragen. Let op: uw Lightwriter is momenteel niet in staat om stemgesprekken te voeren.


### Uw SIM-kaart vervangen

Zorg ervoor dat uw Lightwriter is uitgeschakeld (ga naar **Instellingen**, kies de voeding optie en selecteer **Voeding uit**). De SIM-kaart mag niet verwijderd worden wanneer de Lightwriter nog ingeschakeld is. Draai uw Lightwriter om zodat deze met de toetsen naar beneden ligt. Het kan zijn dat u eventueel een bevestigingsplaat moet verwijderen die voor het klepje van de SIM-kaart zit.

Schroef met de bijgeleverde schroevendraaier de twee kleine schroefjes los en verwijder het SIM-klepje. Bewaar de schroefjes op een veilige plaats.



Druk aan de binnenkant van het SIM-klepje het metalen palletje van u af en til de SIM-houder eruit. Verwijder de SIM-kaart door deze omhoog en uit de SIM-houder te schuiven.

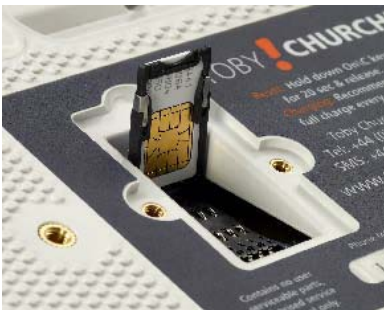

Schuif uw nieuwe SIM-kaart in de houder met de metalen contacten naar u toe en de ontbrekende hoek van de kaart bovenaan rechts, als getoond. Forceer de

SIM-kaart niet in de houder. Zorg ervoor dat de SIM-kaart helemaal in de houder zit.

Zet de houder terug in de Lightwriter en schuif het metalen palletje naar u toe. De SIM-kaart houder zou nu vergrendeld moeten zijn met het ontbrekende hoekje aan de rechterkant.



Schroef het SIM-klepje weer op zijn plaats om de SIM-kaart te beschermen. Probeer een test-sms te verzenden om er zeker van te zijn dat uw SIM-kaart werkt en correct is aangesloten voordat u een eventuele bevestigingsplaat opnieuw aanbrengt.



Let op, het is momenteel niet mogelijk om PIN of PUK codes voor uw SIM-kaart in te voeren met uw Lightwriter. Het is belangrijk om PIN-codes uit te zetten door de SIM-kaart in een mobiele telefoon te zetten voordat u deze gebruikt in uw Lightwriter.

## **Instelling en onderhoud van uw toetsenbord**

Het is belangrijk dat uw toetsenbord comfortabel voor u is om mee te werken, omdat u hiermee uw Lightwriter bedient. Het **Instellingen** hoofdstuk geeft u een hoop hulp met de instellingen voor uw toetsenbord om ervoor te zorgen dat de Lightwriter is ingesteld zoals u deze wilt gebruiken.

### **De correcte toetsenbordbescherming selecteren**

Als u merkt dat u niet altijd de juiste toets precies raakt, kan het helpen om een andere toetsenbordbescherming aan te brengen. Uw Lightwriter wordt geleverd met twee alternatieve toetsenbordbeschermingen. Probeer ze allebei uit om te zien welke het beste voor u werkt. Zie **Toetsenbordbescherming verwisselen** voor meer informatie.

### **Het toetsenbord reinigen**

Na een tijd kan het zijn dat u merkt dat uw Lightwriter soms niet reageert op uw toetsindrukken of dat de toetsen vastzitten. De meest voorkomende reden hiervoor is een vuil toetsenbord. U hoeft zich geen zorgen te maken – het toetsenbord kan gemakkelijk thuis gereinigd worden. Volg de eenvoudige instructies in **Hoe het toetsenbord te reinigen**.

## Toetsenbordbescherming verwisselen

Uw Lightwriter wordt geleverd met drie toetsenbordbeschermingen van verschillende diepte die het mogelijk maken om uw toetsenbord aan te passen om de meest accurate toetsindrukken te verkrijgen.

- **Standaard toetsenbordbescherming**



- **Vlakke toetsenbordbescherming**



- **Diepe toetsenbordbescherming**



Uw Lightwriter wordt normaliter geleverd met de standaard toetsenbordbescherming geïnstalleerd. Als deze niet geschikt is, kunt u deze gemakkelijk vervangen door een van de andere beschermingen. Als u echter moeite hebt met precieze handbewegingen, dan moet u misschien iemand om hulp vragen.

## De toetsenbordbescherming verwijderen

Verwijder met de bijgeleverde schroevendraaier de twee schroefjes die het toetsenbord aan beide zijden vasthouden (afb. 1)



(afb.1)

Plaats nu het losmaakgereedschap voor de toetsenbordbescherming om de beurt in ieder van de drie openingen aan de onderkant van het toetsenbord (afb.2) Zorg ervoor dat u het gebogen deel van het gereedschap tegen het gebogen deel van de opening plaatst.



(afb.2)

Trek het gereedschap voorzichtig naar u toe tot u een klein klikje hoort (afb.3). De toetsenbordbescherming kan nu verwijderd worden. Als het nog steeds een beetje moeilijk gaat, probeer dan opnieuw om het gereedschap in de openingen te plaatsen en trek het voorzichtig maar stevig naar u toe.

**FORCEER HET NIET omdat dit uw Lightwriter kan beschadigen.**



(afb.3)

Trek de toetsenbordbescherming omhoog en weg van uw Lightwriter (afb. 4). De toetsenbordbescherming dient vanaf de onderkant naar boven te worden getrokken en dan naar u toe omdat zich aan de bovenste rand bevestigingspunten bevinden.



(afb.4)



## Toetsenbordbescherming aanbrengen

Neem de nieuwe toetsenbord bescherming en volg de bovenstaande stappen voor het verwijderen in omgekeerde volgorde.

Plaats de bevestigingspunten aan de achterkant van de bovenste rand in de uitsparingen aan de bovenste rand van het frame van het toetsenbord. Dit is het makkelijkst met de toetsenbordbescherming in een hoek van 30 – 45 graden als hier getoond:



Laat de toetsenbordbescherming voorzichtig over de toetsen zakken en wanneer het zich tegen de voorste rand bevindt, de voorkant van de toetsenbordbescherming stevig naar beneden duwen tot u een klik hoort. Zorg ervoor dat de toetsenbordbescherming overal gelijkmatig rond het toetsenbord past en dat alle toetsen op dezelfde diepte zitten. Monteer de twee schroefjes aan de zijkant die de toetsenbordbescherming op zijn plaats houden. Let op: Draai deze schroefjes niet te hard aan omdat u de toetsenbordbescherming of de behuizing van uw Lightwriter kunt beschadigen.



## Hoe uw toetsenbord te reinigen

Als uw toetsen vast blijven plakken of niet reageren, dan kan het zijn dat het toetsenbord gereinigd moet worden. Dit is gemakkelijk te doen en zou slechts 15 minuten moeten duren. Als u precieze handbewegingen moeilijk vindt dan kan het zijn dat u iemand anders om hulp moet vragen.

- Verwijder de toetsenbordbescherming als beschreven in **Toetsenbordbescherming verwisselen**.
- Verwijder alle toetsen van de rubber mat en laat zowel de toetsen als de toetsenbordbescherming weken in warme zeepsop en verwijder eventueel plakkerige overblijfselen.
- Indien nodig kunt u ook voorzichtig de rubber mat afwrijven met een warme, vochtige (maar niet natte!) doek. Zorg ervoor dat u geen water op of achter de rubber mat laat komen omdat dit misschien in uw Lightwriter kan lekken en permanente schade kan veroorzaken.
- Haal de toetsen en de toetsenbordbescherming uit het water en droog af met een doek.
- Plaats de toetsen weer op de rubber mat. Het helpt als ze nog enigszins vochtig zijn. Iedere toets dient gemakkelijk te passen.


De toetsen dienen te worden teruggeplaatst volgens de onderstaande lay-out. Uw Lightwriter aanzetten terwijl u dit doet kan helpen om te controleren dat de toetsen correct zijn aangebracht.



Rechts qwerty



Rechts abcde

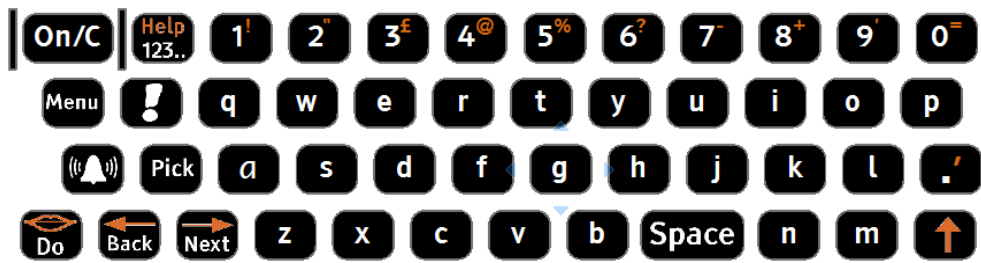

Links qwerty



Links abcde


- Plaats de toetsenbordbescherming weer terug als beschreven in [Toetsenbordbescherming verwisselen](#).

## Bevestigingsplaat monteren

Uw Lightwriter kan bevestigd worden op een plaat die is aangepast aan onze snelkoppeling bevestiging voor uw rolstoel, bureau of nachtkastje.

Om de bevestigingsplaat te monteren, draai uw Lightwriter om en schroef de bijgeleverde bevestigingsplaat aan de vier schroefgaten op de bodem. Gebruik alleen de bijgeleverde schroeven. Andere schroeven gebruiken kan uw Lightwriter ernstig beschadigen, of kan de bevestigingsplaat onveilig maken.

Voor reserveschroeven kunt u contact opnemen met de Toby Churchill Ltd service afdeling.

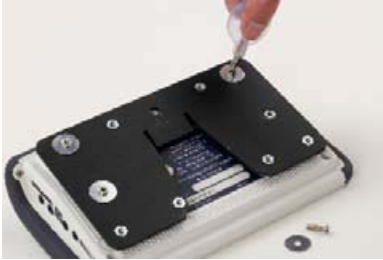

## Probleemoplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Lightwriter loopt vast of reageert niet wanneer toetsen worden ingedrukt	Mogelijke systeemfout	Houd <b>Aan/C</b> 15 seconden ingedrukt en laat dan los om uw Lightwriter te resetten
Lightwriter werkt niet. Geen weergavescherm.	Batterij leeg Batterijen moeten worden vervangen	Laad de Lightwriter een paar uur op – u kunt de Lightwriter gebruiken terwijl deze oplaadt. Neem contact op met Toby Churchill Ltd.
Oplaadlampje brandt niet	Stroomvoorziening niet aangesloten Oplader is defect	Controleer of het stopcontact werkt Neem contact op met Toby Churchill Ltd.
Toetsen dienen lang te worden ingedrukt voor ze reageren.	Instelling voor toetsen vasthouden te lang	Verkort de tijd met de instelling voor toetsen vasthouden
Toetsen lijken niets te selecteren wanneer je ze indrukt	Instelling voor toetsvertraging te lang	Verkort de tijd met de instelling voor toetsvertraging
Toetsen lijken stroef of plakkerig	Toetsenbord of toetsenbordbescherming moet worden gereinigd	<b>Zie Hoe uw toetsenbord te reinigen</b> hoofdstuk
Lightwriter spreekt niet	Volume omlaag gezet	Ga naar de volume-instelling om het volume harder te zetten
Zoem-toets doet het niet	Geen geluid geselecteerd voor de zoem-toets	Kies in instellingen een zoemtoon
SMS-berichten worden niet verstuurd	Mobiele telefoon uitgeschakeld	Schakel de mobiele telefoon aan in de ingebouwde telefooninstelling
Er is iets op de Lightwriter gemorst	Niet in paniek raken	Dep zo veel mogelijk van het gemorste op. Laat de Lightwriter drogen. Reinig indien nodig het toetsenbord

**Uw Leverancier:**



RTD Het Dorp B.V.  
Heijenoordseweg 130  
6813 GC Arnhem  
Tel. 026-3529292  
Fax 026-3529292  
[info@rtdhetdorp.nl](mailto:info@rtdhetdorp.nl)  
[www.rtdhetdorp.nl](http://www.rtdhetdorp.nl)